

DuBaStar

Modell 3012902 / 3012912,
Badebrett

Montage- / Bedienungsan- leitung

BEDEUTUNG DER VERWENDETEN KENNZEICHNUNGEN

Farblich hinterlegte Sicherheitshinweise sind zwingend zu befolgen!

- Dieses Symbol steht für Hinweise und Empfehlungen.
- [] Verweis auf eine Bildnummer.
- () Verweis auf ein Funktionselement innerhalb eines Bildes.

EINLEITUNG

Lesen und beachten Sie vor der erstmaligen Inbetriebnahme dieses Dokument.

Kinder und Jugendliche sollten dieses Dokument vor dem erstmaligen Gebrauch ggf. zusammen mit den Eltern bzw. einer Aufsichts- oder Begleitperson lesen.

Ihr Fachhändler sollte Sie zusätzlich in die Benutzung Ihres Badebretts einweisen.

Die vorliegende Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, sich mit der Handhabung des Produktes vertraut zu machen sowie Unfälle zu vermeiden.



- Die abgebildeten Ausstattungsvarianten können von Ihrem Modell abweichen.

Benutzer mit Sehbehinderung finden die PDF-Dateien zusammen mit weiteren Informationen über unsere Produkte auf unserer Webseite unter:

< www.meyra.com >.

- Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Fachhändler.

Alternativ können sich Benutzer mit Sehbehinderung die Dokumentationen von einer Hilfsperson vorlesen lassen.

Informieren Sie sich regelmäßig über die Produktsicherheit und mögliche Rückrufaktionen unserer Produkte im < *Infozentrum* > auf unserer Webseite:

< www.meyra.com >.

Wir haben ein Produkt entwickelt, das die technischen und gesetzlichen Vorgaben für Medizinprodukte erfüllt. Für die Mitteilung eines dennoch nicht auszuschließenden schwerwiegenden Vorfalles nutzen Sie bitte unsere Emailadresse < info@meyra.de > und informieren die zuständige Behörde Ihres Mitgliedstaates.

MODELLAUFZÄHLUNG

Diese Bedienungsanleitung ist für folgende Modelle gültig:

Modell 3012902

Modell 3012912

INDIKATIONEN / KONTRAINDIKATIONEN

Bei allergischen Reaktionen, Hautrötungen und/oder Druckstellen bei der Verwendung des Badebretts ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen.

Das Badebrett dient zur Verbesserung der selbstständigen Ausübung der Körperpflege für Personengruppen mit nicht zwingend krankheitsbedingten Mobilitätseinschränkungen (eingeschränkte Muskelkraft, starke Bewegungseinschränkungen, Gliedmaßenverluste, Gehunfähigkeit oder starke Einschränkung der Gehfähigkeit).

Das Badebrett darf nicht eingesetzt werden bei:

- Unfähigkeit zum Sitzen.
- Kognitiven Einschränkungen und mentale Retardierung, die ein selbstständiges Nutzen des Badebretts ausschließen.

- Einfluss beeinträchtigender Medikamente (Rücksprache mit Arzt oder Apotheke).
- ☞ Zu diesen und weiteren möglichen Risiken mit diesem Produkt fragen Sie Ihren Arzt, Therapeuten oder Fachhändler.

Das Badebrett darf nur mit Hilfsperson eingesetzt werden bei:

- Nicht ausreichender Sehfähigkeit.
- Unkontrollierbaren Gleichgewichts- und/oder Bewegungsstörungen.
- Fehlenden Fähigkeiten selbstständig aufzustehen.

EMPFANG

Alle Produkte werden bei uns im Werk auf Fehlerfreiheit geprüft und in Spezialkartons verpackt.

- ☞ Wir möchten Sie dennoch bitten, das Fahrzeug sofort nach Erhalt – am besten im Beisein des Überbringers – auf eventuelle während des Transportes aufgetretene Schäden zu überprüfen.
- ☞ Die Verpackung des Badebretts sollte für einen eventuell später notwendigen Transport aufbewahrt werden.

ZWECKBESTIMMUNG

Diese Produkt dient als Hilfsmittel zur Unterstützung bei der selbstständigen bzw. durch Pflegepersonen durchzuführenden körperlichen Hygiene im Bad- und Duschbereich.

VERWENDUNG

Das Badebrett bietet in der Badewanne eine erhöhte Sitzposition und erleichtert so den Bade- bzw. Duschvorgang. Es hat einen Handgriff für sicheres Hinsetzen und Aufstehen, sowie eine Sitzfläche mit Ablaufmöglichkeit des Wassers. Durch die verstellbaren Fixierfüße und die 2 möglichen Größen des Badebretts, ist dieses an jede herkömmliche Badewanne genau anpassbar.

- ☞ Das Innenmaß am oberen Rand der Badewanne darf das in den technischen Daten angegebene Innenmaß nicht überschreiten.

KOMBINATION MIT HERSTELLERFREMDEN PRODUKTEN

Jede Kombination Ihrer Badebretts mit nicht von uns gelieferten Komponenten stellt generell eine Veränderung Ihres Badebretts dar. Erkundigen Sie sich bei uns, ob es eine gültige Kombinationsfreigabe von uns gibt.

WIEDEREINSATZ

Das Badebrett ist für einen Wiedereinsatz geeignet. Vor jedem Wiedereinsatz ist das Badebrett einer kompletten Inspektion zu unterziehen.

- ☞ Die für den Wiedereinsatz erforderlichen hygienischen Maßnahmen sind nach einem validierten Hygieneplan durchzuführen und müssen eine Desinfektion einschließen.

In Abhängigkeit des Wartungsergebnisses ist ein mehrfacher Wiedereinsatz möglich.

LEBENSDAUER

Wir gehen bei ihrem Badebrett von einer zu erwartenden durchschnittlichen Produktlebensdauer von 4 Jahren aus, soweit das Badebrett innerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs eingesetzt wird und sämtliche Wartungs- und Servicevorgaben eingehalten werden.

Die Lebensdauer ihres Badebretts ist sowohl von der Benutzungshäufigkeit, der Einsatzumgebung und der Pflege abhängig.

Durch den Einsatz von Ersatzteilen lässt sich die Lebensdauer des Badebretts verlängern. Ersatzteile sind im Regelfall bis zu 5 Jahre nach Fertigungsauslauf erhältlich.

- ☞ Die angegebene Lebensdauer stellt keine zusätzliche Garantie dar.

LIEFERUMFANG

Badebrett:


- (1) 1x Sitzplatte
- (2) 2x Gummi-Verstellfuß
- (3) 2x Schraube
- 1x Montage- und Gebrauchsanleitung

MONTAGEANLEITUNG

Die Durchführung der folgenden Montage ist von einem qualifizierten Fachmann durchzuführen.

Während der gesamten Montage auf Klemmstellen achten. – Quetschgefahr!

Den Arbeitsbereich während der Montage sauber halten!

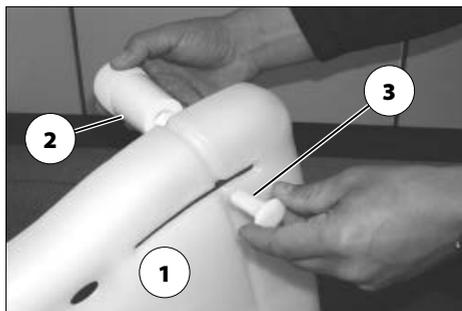

1. Die Gummi-Verstellfüße unter das Badebrett montieren.

☞ Dazu die Befestigungsschrauben von oben durch die Langlöcher des Badebretts stecken und nur soweit in die Gummi-Verstellfüße einschrauben, dass diese sich noch verschieben lassen.

2. Das Badebrett mit dem Griff zur Wand quer über die Badewanne legen und an den Badewannenrand schieben.

☞ Es ist sicherzustellen, dass die Aussparung des Badebretts weit genug auf dem Badewannenrand aufliegt.

3. Die Gummi-Verstellfüße soweit nach außen gegen den Badewannenrand schieben, bis diese ohne Druck anliegen.

4. Die Gummi-Verstellfüße handfest festdrehen.

☞ Das Badebrett ist einsatzbereit.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Sicherheitshinweise

Stellen Sie sich nicht mit den Füßen auf die Sitzfläche. – Kippgefahr!

Vor dem Gebrauch den korrekten Sitz des Badebrettes in der Badewanne prüfen!

Achten sie darauf, dass das Badebrett weit genug auf dem Badewannenrand aufliegt!

Die richtige Einstellung der Gummi-Verstellfüße ist in regelmäßigen Abständen zu prüfen!

Vor dem Gebrauch sind die Gummi-Verstellfüße handfest anzuziehen!

Setzen Sie sich immer mittig auf die Sitzfläche!

Stützen Sie sich nur senkrecht auf das Badebrettes. – Unfallgefahr!

Überzeugen Sie sich vor der Benutzung von dem gebrauchsfähigen Zustand des Produktes. – Unfallgefahr!

Ein sprödes Badebrett nicht Richten und wieder einsetzen. – Unfallgefahr!

Seifen- und Duschmittel erhöhen die Rutschgefahr!

Nach dem Reinigen die korrekte Funktion des Badebrettes prüfen!

Ein abgenutztes oder beschädigtes Badebrett sollte unverzüglich erneuert werden. – Unfallgefahr!

Abgenutzte oder beschädigte Gummi-Verstellfüße sollten unverzüglich erneuert werden. – Unfallgefahr!

Die Fa. MEYRA kann im Sinne der Produkthaftung nicht für Schäden oder Risiken haftbar gemacht werden, die durch unbeaufsichtigte Kinder im Zusammenhang mit dem Produkt verursacht werden!

Ihr Badebrett kann entflammbare Materialien enthalten.

Das Rauchen beim Umgang mit dem Badebrett ist verboten.

Bei direkter Wärmestrahlung (Sonnenlicht, Wärmequellen etc.) kann sich das Badebrett auf Temperaturen über 41 °C erhitzen.

– Es besteht Verletzungsgefahr bei Berühren durch unbedeckte Hautpartien!

REINIGUNG

Die Kunststoffteile werden durch nichtionische Tenside sowie durch Lösungsmittel und insbesondere Alkohole angegriffen.

Das Badebrett ist nicht zur Reinigung in Reinigungsautomaten geeignet!

Zum Reinigen verwenden Sie am besten eine Seifenlösung. Das Reinigungsmittel sollte in jedem Fall einen ph-Wert von min. 6 aufweisen (Neutralreiniger).

DESINFEKTION

Wird das Produkt von mehreren Personen genutzt (z. B. im Pflegeheim), so ist die Anwendung eines handelsüblichen Desinfektionsmittels vorgeschrieben.

- ☞ Vor der Desinfektion ist das Badebrett zu reinigen.
- ☞ Eine Sprüh- oder Wischdesinfektion ist mit geprüften und anerkannten Desinfektionsmitteln zugelassen.

Auskünfte über geprüfte und anerkannte Desinfektionsmittel und -verfahren kann Ihnen Ihre nationale Einrichtung für Gesundheitsschutz geben.

- ☞ Bei der Anwendung von Desinfektionsmitteln kann es vorkommen, dass u. U. Oberflächen durch die Anwendung in Mitleidenschaft gezogen werden, die die längerfristige Funktionsfähigkeit der Bauteile einschränken können.
- ☞ Dabei sind die vom Hersteller vorgegebenen Anwendungshinweise zu beachten.

REPARATUREN

Reparaturen sind grundsätzlich vom Fachhändler durchzuführen.

Instandsetzung

Zur Durchführung von Instandsetzungsarbeiten wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Fachhändler. Er ist in die Ausführung der Arbeiten eingewiesen.

Service

Falls Sie Fragen haben sollten oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, der Beratung, Service sowie Reparaturen übernehmen kann.

Ersatzteile

Ersatzteile sind nur über einen Fachhändler zu beziehen. Im Falle einer Reparatur sind nur Original-Ersatzteile zu verwenden!

- ☞ Bauteile von Fremdfirmen können Störungen hervorrufen.


Eine Ersatzteilliste mit den entsprechenden Artikelnummer finden Sie im Kapitel *Ersatzteilliste* auf Seite 8.

Für eine korrekte Ersatzteil-Lieferung ist in jedem Fall die entsprechende Serien-Nr. (SN) des Badebretts mit anzugeben! Diese finden Sie auf dem Typenschild.

Bei jeder vom Fachhändler durchgeführten Reparatur am Badebrett sind ergänzende Informationen wie z. B. Montage-/Bedienungshinweise der Bedienungsanleitung des Badebretts beizulegen sowie das Datum der Änderung festzuhalten und bei Ersatzteilbestellungen mit anzugeben.

Dadurch soll bei späteren Ersatzteilbestellungen eine falsche Bestellangabe verhindert werden.

ENTSORGUNG

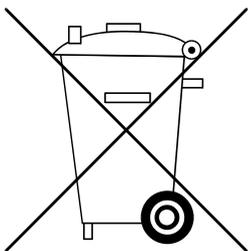

Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

Erfragen Sie bitte bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.

WARTUNG

Eine mangelhafte oder vernachlässigte Pflege und Wartung des Badebretts führt zur Einschränkung der Produzentenhaftung.

Wartungsarbeiten

Der folgende Wartungsplan stellt einen Leitfaden für die Durchführung der Wartungsarbeiten dar.

- ☞ Der Wartungsplan gibt keinen Aufschluss über den tatsächlich notwendigen, am Badebrett festgestellten Arbeitsumfang.

Wartungsplan

WANN	WAS	ANMERKUNG
Vor der Benutzung	Badebrett auf Beschädigung prüfen.	Prüfung selbst oder durch Hilfsperson durchführen. Bei Verformung oder Rissbildung umgehend von Ihrem Fachhändler ersetzen lassen. – Unfallgefahr!
Vor der Benutzung	Badebrett auf korrekten Sitz in der Badewanne prüfen und ggf. korrigieren.	Prüfung selbst oder durch Hilfsperson durchführen.
Nach der Benutzung	Reinigung	Reinigung selbst oder durch Hilfsperson durchführen.
Alle 6 Monate (je nach Gebrauchshäufigkeit)	Gummipuffer auf Beschädigung prüfen.	Prüfung selbst oder durch Hilfsperson durchführen.
Empfehlung des Herstellers: Alle 12 Monate (je nach Gebrauchshäufigkeit)	Sicherheitsinspektion	Vom Fachhändler durchzuführen.

ERSATZTEILLISTE

Pos.-Nr.	Artikel-Nr.	Stück	Artikelbezeichnung
2	1 048 047	1	Anlagestück mit Gummi-Verstellfuß
3	1 048 048	1	Anschlagschraube für Gummi-Verstellfuß
–	1 048 049	1	Auflagepuffer 60 x 10 mm
–	1 048 050	1	Anschlagpuffer, seitlich, 32 x 20 mm
–	1 048 052	1	Antirutschstopfen rund, ø 19,6 mm

TECHNISCHE DATEN

Alle Angaben innerhalb der < *Technischen Daten* > beziehen sich auf die Standard-Ausführung.

Maßtoleranz ± 15 mm, $\pm 2^\circ$.

Angewendete Normen

Das Badebrett entspricht der Norm:

- ISO 17966: 2016

Angaben nach ISO für Modell 3012902, Badebrett

Länge	690 mm
Breite	290 mm
<u>Innenmaß der Badewanne</u>	
oberer Rand	min. 480 mm
oberer Rand	max. 590 mm
max. Benutzergewicht	130 kg
Gewicht	2,1 kg
Material	HDPE (Polyethylen)
max. Wassertemperatur	80 °C
Umgebungstemperatur	+10 °C bis + 80 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis + 80 °C

Angaben nach ISO für Modell 3012912, Badebrett

Länge	740 mm
Breite	290 mm
<u>Innenmaß der Badewanne</u>	
oberer Rand	min. 530 mm
oberer Rand	max. 640 mm
max. Benutzergewicht	130 kg
Gewicht	2,4 kg

Material	HDPE (Polyäthylen)
max. Wassertemperatur	80 °C
Umgebungstemperatur	+10 °C bis + 80 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis + 80 °C

Typenschild

Das Typenschild befindet sich innen an der Wandung.

Bedeutung der Symbole auf dem Typenschild



Hersteller



Bestellnummer



Seriennummer



Produktionsdatum



zul. Benutzergewicht



Bedienungsanleitung beachten



Medizinprodukt

GEWÄHRLEISTUNG / GARANTIE

Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung sowie unsachgemäß durchgeführte Wartungsarbeiten als auch insbesondere technische Änderungen und Ergänzungen (Anbauten) ohne unsere Zustimmung führen zum Erlöschen sowohl der Gewährleistungs- und Garantieansprüche als auch der Produkthaftung allgemein.

Für dieses Produkt übernehmen wir im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen die gesetzliche Gewährleistung und gegebenenfalls ausgesprochene bzw. vereinbarte Garantien. Für Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche wenden Sie sich bitte mit dem nachfolgenden GEWÄHRLEISTUNGS- / GARANTIE-ABSCHNITT und den darin benötigten Angaben über die Modellbezeichnung, die Lieferschein-Nr. mit Lieferdatum und Seriennummer (SN) an Ihren Fachhändler.

Die Seriennummer (SN) ist vom Typenschild abzulesen.

Voraussetzung für die Anerkennung von Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüchen ist in jedem Fall der bestimmungsgemäße Gebrauch des Produktes, die Verwendung von Original-Ersatzteilen durch Fachhändler sowie die regelmäßige Durchführung von Wartung und Inspektion.

Für Oberflächenbeschädigungen, Bereifung der Räder, Beschädigungen durch gelöste Schrauben oder Muttern sowie ausgeschlagene Befestigungsbohrungen durch häufige Montagearbeiten ist die Garantie ausgeschlossen.

Diese Bedienungsanleitung als Bestandteil des Produktes ist bei einem Benutzer- sowie Besitzerwechsel diesem mitzugeben.

Für die Bewertung unserer Produkte können Sie unser < Infozentrum > Bereich < PMS > auf unserer Webseite < www.meyra.com > benutzen.

Technische Änderungen im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns vor.



Dieses Produkt ist konform mit der EG-Richtlinie 93/42/EWG und erfüllt nach dem 25.05.2021 die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte..

Gewährleistungs- / Garantie-Abschnitt

Bitte ausfüllen! Im Bedarfsfall kopieren und die Kopie an Ihren Fachhändler einsenden.

Gewährleistung / Garantie

Modellbezeichnung:

Lieferschein-Nr.:

SN (siehe Typenschild):

Lieferdatum:

Stempel des Fachhändlers:

Ihr Fachhändler

MEYRA GmbH

Meyra-Ring 2



32689 Kalletal-Kalldorf
DEUTSCHLAND



Tel +49 5733 922 - 311

Fax +49 5733 922 - 9311



info@meyra.de

www.meyra.de
