


# DuBaStar Badewannensitz

Modell: 3016742 / 3016752

## Montage- / Gebrauchsanleitung

### BEDEUTUNG DER VERWENDETEN KENNZEICHNUNGEN

Farblich hinterlegte Sicherheitshinweise sind zwingend zu befolgen!

-  Dieses Symbol steht für Hinweise und Empfehlungen
- [ ] Verweis auf eine Bildnummer
- ( ) Verweis auf ein Funktionselement innerhalb eines Bildes.

### EINLEITUNG


Lesen und beachten Sie vor der erstmaligen Inbetriebnahme dieses Dokument.

Kinder und Jugendliche sollten dieses Dokument vor dem erstmaligen Gebrauch ggf. zusammen mit den Eltern bzw. einer Aufsichts- oder Begleitperson lesen.

Ihr Fachhändler sollte Sie zusätzlich in die Benutzung Ihres Badewannensitzes einweisen.


Die vorliegende Gebrauchsanleitung soll Ihnen helfen, sich mit der Handhabung Ihres Badewannensitzes vertraut zu machen sowie Unfälle zu vermeiden.



-  Die abgebildeten Ausstattungsvarianten können von Ihrem Modell abweichen.

Benutzer mit Sehbehinderung finden die PDF-Dateien zusammen mit weiteren Informationen über unsere Produkte auf unserer Webseite unter:

< [www.meyra.com](http://www.meyra.com) >.

-  Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Fachhändler.

Alternativ können sich Benutzer mit Sehbehinderung die Dokumentationen von einer Hilfsperson vorlesen lassen.

Informieren Sie sich regelmäßig über die Produktsicherheit und mögliche Rückrufaktionen unserer Produkte im < *Infozentrum* > auf unserer Webseite:

< [www.meyra.com](http://www.meyra.com) >.

Wir haben ein Produkt entwickelt, das die technischen und gesetzlichen Vorgaben für Medizinprodukte erfüllt. Für die Mitteilung eines dennoch nicht auszuschließenden schwerwiegenden Vorfalles nutzen Sie bitte unsere Emailadresse < [info@meyra.de](mailto:info@meyra.de) > und informieren die zuständige Behörde Ihres Mitgliedstaates.

## **MODELLAUFZÄHLUNG**

Diese Gebrauchsanleitung ist für folgende Modelle gültig:

Modell 3016742 Badewannensitz

Modell 3016752 Badewannensitz mit Rückenlehne

## **INDIKATIONEN / KONTRAINDIKATIONEN**


Bei allergischen Reaktionen, Hautrötungen und/oder Druckstellen bei der Verwendung des Badewannensitzes ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen.

Der Badewannensitz dient zur Verbesserung der selbstständigen Ausübung der Körperpflege für Personengruppen mit nicht zwingend krankheitsbedingten Mobilitätseinschränkungen (eingeschränkte Muskelkraft, starke Bewegungseinschränkungen, Gliedmaßenverluste, Gehunfähigkeit oder starker Einschränkung der Gehfähigkeit).

Der Badewannensitz darf nicht eingesetzt werden bei:



- Unfähigkeit zum Sitzen.
- Starken Gleichgewichts- und/oder Wahrnehmungsstörungen.
- Kognitiven Einschränkungen und mentaler Retardierung, die ein selbstständiges Nutzen der Sitzhilfen ausschließen.
- Einfluss beeinträchtigender Medikamente (Rücksprache mit Arzt oder Apotheke).

Der Badewannensitz darf nur mit Hilfsperson eingesetzt werden bei:

- Nicht ausreichender Sehfähigkeit.
  - Unkontrollierbaren Gleichgewichts- und/oder Bewegungsstörungen.
  - Fehlenden Fähigkeiten selbstständig aufzustehen.
-  Zu diesen und weiteren möglichen Risiken mit diesem Produkt fragen Sie Ihren Arzt, Therapeuten oder Fachhändler.

## **EMPFANG**

Alle Produkte werden bei uns im Werk auf Fehlerfreiheit geprüft und in Spezialkartons verpackt.

-  Wir möchten Sie dennoch bitten, den Badewannensitz sofort nach Erhalt – am besten im Beisein des Überbringers – auf eventuelle während des Transportes aufgetretene Schäden zu überprüfen.
-  Die Verpackung des Badewannensitzes sollte für einen eventuell später notwendigen Transport aufbewahrt werden.

## **ZWECKBESTIMMUNG**

Der Badewannensitz dient als Sitzhilfe/-fläche zur Erleichterung der Körperpflege beim Baden bzw. Duschen in der Badewanne.

## **VERWENDUNG**

Der Badewannensitz dient Personen mit eingeschränkter Mobilität zur Erleichterung der Körperpflege beim Baden bzw. Duschen in der Badewanne.

Der Badewannensitz bietet während der Körperhygiene eine Sitzmöglichkeit in Längsachse der Badewanne.

## **KOMBINATION MIT HERSTELLERFREMDEN PRODUKTEN**

Jede Kombination Ihres Badewannensitzes mit nicht von uns gelieferten Komponenten stellt generell eine Veränderung Ihres Badewannensitzes dar. Erkundigen Sie sich bei uns, ob es eine gültige Kombinationsfreigabe von uns gibt.

## **WIEDEREINSATZ**

Ihr Badewannensitz ist für einen Wiedereinsatz geeignet. Vor jedem Wiedereinsatz ist der Badewannensitz einer kompletten Inspektion zu unterziehen.

Die für den Wiedereinsatz erforderlichen hygienischen Maßnahmen sind nach einem validierten Hygieneplan durchzuführen und müssen eine Desinfektion einschließen.

In Abhängigkeit des Wartungsergebnisses ist ein mehrfacher Wiedereinsatz möglich.

## **LEBENSDAUER**

Wir gehen bei ihrem Badewannensitz von einer zu erwartenden durchschnittlichen Produktlebensdauer von 4 Jahren aus, soweit der Badewannensitz innerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs eingesetzt wird und sämtliche Wartungs- und Servicevorgaben eingehalten werden.

Die Lebensdauer ihres Badewannensitzes ist sowohl von der Benutzungshäufigkeit, der Einsatzumgebung und der Pflege abhängig.

Durch den Einsatz von Ersatzteilen lässt sich die Lebensdauer des Badewannensitzes verlängern. Ersatzteile sind im Regelfall bis zu 5 Jahre nach Fertigungsauslauf erhältlich.

Die angegebene Lebensdauer stellt keine zusätzliche Garantie dar.

# LIEFERUMFANG

## Badewannensitz:

- (1) 1x Sitzplatte
- (2) 1x Seitenrahmen rechts
- (3) 1x Seitenrahmen links
- (4) 1x Sitzrohr vorn
- (5) 1x Sitzrohr hinten
- 1x Montage- und Gebrauchsanleitung

## Badewannensitz mit Rückenlehne:

- 1x Badewannensitz
- (6) 1x Rückenrohr rechts
- (7) 1x Rückenrohr links
- (8) 1x Rückenlehne
- (9) 4x Verschraubung
- (10) 2x Kunststoffstopfen
- 1x Montage- und Gebrauchsanleitung

# MONTAGEANLEITUNG

Die Durchführung der folgenden Montage ist von einem qualifizierten Fachmann durchzuführen.

Während der gesamten Montage auf Klemmstellen achten. – Quetschgefahr!

Den Arbeitsbereich während der Montage sauber halten!

## Badewannensitz

1. Die Klemmschrauben (*a* auf Seite 11) lösen.
2. Die Seitenrahmen (2 auf Seite 11 + 3 auf Seite 11) auf beiden Seiten gleich auf die Wannenbreite teleskopieren.
  - ☞ Die Mindestauflagefläche beträgt 5 cm.

3. Die Klemmschrauben (*a* auf Seite 11) wieder festdrehen.
4. Die Sitzplatte (1 auf Seite 11) fest auf die Sitzrohre aufdrücken [*B* auf Seite 11]).

## Badewannensitz mit Rückenlehne

- ☞ Die Bauteile zuerst wie Pos.1. bis 4. unter Kapitel *Badewannensitz* auf Seite 4 montieren.
5. Die Rückenrohre (6 auf Seite 11)+(7 auf Seite 11) montieren [*C* auf Seite 11]).
  - Dazu die Rückenrohre von vorn an die Halter positionieren und mit der Verschraubung (9 auf Seite 11) befestigen.
  - ☞ Dabei werden die Muttern von innen aufgeschraubt [*D* auf Seite 11].
6. Die Rückenlehne (8 auf Seite 11) auf die Rückenrohre (6 auf Seite 11 + 7 auf Seite 11) aufschieben (E).
7. Die zwei beiliegenden Kunststoffstopfen (15 auf Seite 11) fest in die dafür vorgesehenen Löcher zur Fixierung der Rückenlehne drücken.
8. Stellen Sie sicher, dass sich die Rückenlehne nicht von den Rückenrohren abziehen lässt.

## GEBRAUCHSANLEITUNG

Überzeugen Sie sich vor der Benutzung von dem gebrauchsfähigen Zustand Ihres Badewannensitzes. – Unfallgefahr!

Einen verformten Badewannensitz nicht Richten und wieder einsetzen. – Unfallgefahr!

Stellen Sie sich nicht mit den Füßen auf die Sitzplatte. – Sturzgefahr!

Setzen Sie sich immer mittig auf die Sitzplatte!

Achten sie darauf, dass die Auflageelemente korrekt auf die Breite der Wanne eingestellt sind, d. h. die Gummipuffer müssen vollständig und fest auf dem Badewannenrand aufliegen!

Die Gummipuffer sowie der Wannenrand sind im Auflagebereich seifen- und duschmittelfrei zu halten. – Rutschgefahr!

Die Gummipuffer Öl- und Fettfrei halten. – Unfallgefahr!

Abgenutzte oder beschädigte Gummipuffer sollten unverzüglich erneuert werden. – Unfallgefahr!

Stützen Sie sich beim Badewannenein- und -ausstieg nicht auf die Auflageelemente ab.

Die Fa. MEYRA kann im Sinne der Produkthaftung nicht für Schäden oder Risiken haftbar gemacht werden, die durch unbeaufsichtigte Kinder im Zusammenhang mit dem Duschkloppstanz verursacht werden!

Ihr Badewannensitz kann entflammable Materialien enthalten.

Das Rauchen beim Umgang mit dem Badewannensitz ist verboten.

Bei direkter Wärmestrahlung (Sonnenlicht, Wärmequellen etc.) kann sich der Badewannensitz auf Temperaturen über 41 °C erhitzen.

– Es besteht Verletzungsgefahr bei Berühren durch unbedeckte Hautpartien!

## REINIGUNG

Die Kunststoffteile werden durch nichtionische Tenside sowie durch Lösungsmittel und insbesondere Alkohole angegriffen.

Die Sitzplatte ist nicht zur Reinigung in Reinigungsautomaten geeignet!

Die Rückenlehne ist nicht zur Reinigung in Reinigungsautomaten geeignet!

Zum Reinigen verwenden Sie am besten eine Seifenlösung. Das Reinigungsmittel sollte in jedem Fall einen pH-Wert von min. 6 aufweisen (Neutralreiniger).

## DESINFEKTION

Wird der Badewannensitz von mehreren Personen genutzt (z. B. im Pflegeheim), so ist die Anwendung eines handelsüblichen Desinfektionsmittels vorgeschrieben.

☞ Vor der Desinfektion ist der Badewannensitz zu reinigen.

☞ Eine Sprüh- oder Wischdesinfektion ist mit geprüften und anerkannten Desinfektionsmitteln zugelassen.

Auskünfte über geprüfte und anerkannte Desinfektionsmittel und -verfahren kann Ihnen Ihre nationale Einrichtung für Gesundheitsschutz geben.

☞ Bei der Anwendung von Desinfektionsmitteln kann es vorkommen, dass u. U. Oberflächen durch die Anwendung in Mitleidenschaft gezogen werden, die die längerfristige Funktionsfähigkeit der Bauteile einschränken können.

☞ Dabei sind die vom Hersteller vorgegebenen Anwendungshinweise zu beachten.

## REPARATUREN

Reparaturen sind grundsätzlich vom Fachhändler durchzuführen.

### Instandsetzung

Zur Durchführung von Instandsetzungsarbeiten wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Fachhändler. Er ist in die Ausführung der Arbeiten eingewiesen.

### Service

Falls Sie Fragen haben sollten oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, der Beratung, Service sowie Reparaturen übernehmen kann.

### Ersatzteile

Ersatzteile sind nur über einen Fachhändler zu beziehen. Im Falle einer Reparatur sind nur Original-Ersatzteile zu verwenden!

- ☞ Bauteile von Fremdfirmen können Störungen hervorrufen.


Eine Ersatzteilliste mit den entsprechenden Artikelnummern und Zeichnungen liegt beim Fachhändler.

Für eine korrekte Ersatzteil-Lieferung ist in jedem Fall die entsprechende Serien-Nr. (SN) des Badewannensitzes mit anzugeben! Diese finden Sie auf dem Typenschild.

Bei jeder vom Fachhändler durchgeführten Reparatur am Badewannensitz sind ergänzende Informationen wie z. B. Montage-/Bedienungshinweise der Gebrauchsanleitung des Badewannensitzes beizulegen sowie das Datum der Änderung festzuhalten und bei Ersatzteilbestellungen mit anzugeben.

Dadurch soll bei späteren Ersatzteilbestellungen eine falsche Bestellangabe verhindert werden.

## ENTSORGUNG

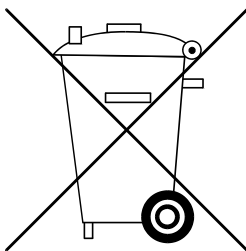

Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

Erfragen Sie bitte bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.

## WARTUNG

Eine mangelhafte oder vernachlässigte Pflege und Wartung des Badewannensitzes führt zur Einschränkung der Produzentenhaftung.

### Wartungsarbeiten

Der folgende Wartungsplan stellt einen Leitfaden für die Durchführung der Wartungsarbeiten dar.

- ☞ Der Wartungsplan gibt keinen Aufschluss über den tatsächlich notwendigen, am Badewannensitz festgestellten Arbeitsumfang.

## Wartungsplan

WANN	WAS	ANMERKUNG
<b>Vor der Benutzung</b>	<b>Rücken- und Rahmenrohre auf Beschädigung prüfen.</b>	Prüfung selbst oder durch Hilfsperson durchführen. Bei Verformung oder Rissbildung im Schweißnahtbereich umgehend Fachwerkstatt zur Instandsetzung aufsuchen. – Unfallgefahr!
<b>Vor der Benutzung</b>	<b>Sitzplatte und Rückenlehne auf Beschädigung prüfen.</b>	Prüfung selbst oder durch Hilfsperson durchführen. Bei Verformung oder Rissbildung umgehend Fachwerkstatt zur Instandsetzung aufsuchen. – Unfallgefahr!
<b>Nach der Benutzung</b>	<b>Reinigung</b>	Reinigung selbst oder durch Hilfsperson durchführen.
<b>Alle 6 Monate</b> (je nach Gebrauchshäufigkeit)	<b>Gummikappen auf Beschädigung und Schraubverbindungen auf festen Sitz prüfen.</b>	Prüfung selbst oder durch Hilfsperson durchführen.
<b>Empfehlung des Herstellers:</b> Alle 12 Monate (je nach Gebrauchshäufigkeit)	Sicherheitsinspektion	Vom Fachhändler durchführen.

## TECHNISCHE DATEN

Alle Angaben innerhalb der < *Technischen Daten* > beziehen sich auf die Standard-Ausführung.

Maßtoleranz  $\pm 15$  mm,  $\pm 2^\circ$ .

### Angewendete Normen

Der Badewannensitz entspricht der Norm:

- ISO 17966: 2016

### Angaben nach ISO für Modell 3016742

Länge	400 mm
Breite	710 – 890 mm
Höhe	235 mm
Sitzfläche	400 x 400 mm
Belastbarkeit	120 kg
Gewicht	2,5 kg
Umgebungstemperatur	+10°C bis + 40°C
Lagertemperatur	-40°C bis + 50°C
max. Wassertemperatur zum Reinigen	80°C
Typenschild	am Sitzrohr

### Angaben nach ISO für Modell 3016752

Länge	440 mm
Breite	710 – 890 mm
Höhe	360 mm
Sitzfläche	400 x 400 mm
Rückenlehnenhöhe	330 mm
Belastbarkeit	120 kg
Gewicht	3,0 kg
Umgebungstemperatur	+10°C bis + 40°C
Lagertemperatur	-40°C bis + 50°C

### Angaben nach ISO für Modell 3016752

max. Wassertemperatur zum Reinigen	80°C
Typenschild	am Sitzrohr

### Bedeutung der Symbole auf dem Typenschild



Hersteller



Bestellnummer



Seriennummer



Produktionsdatum



zul. Benutzergewicht



Gebrauchsanleitung beachten



Medizinprodukt



# GEWÄHRLEISTUNG / GARANTIE

Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung sowie unsachgemäß durchgeführte Wartungsarbeiten als auch insbesondere technische Änderungen und Ergänzungen (Anbauten) ohne unsere Zustimmung führen zum Erlöschen sowohl der Gewährleistungs- und Garantieansprüche als auch der Produkthaftung allgemein.

Für dieses Produkt übernehmen wir im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen die gesetzliche Gewährleistung und gegebenenfalls ausgesprochene bzw. vereinbarte Garantien. Für Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche wenden Sie sich bitte mit dem nachfolgenden GEWÄHRLEISTUNGS- / GARANTIE-ABSCHNITT und den darin benötigten Angaben über die Modellbezeichnung, die Lieferschein-Nr. mit Lieferdatum und Seriennummer (SN) an Ihren Fachhändler.

Die Seriennummer (SN) ist vom Typenschild abzulesen.

Voraussetzung für die Anerkennung von Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüchen ist in jedem Fall der bestimmungsgemäße Gebrauch des Produktes, die Verwendung von Original-Ersatzteilen durch Fachhändler sowie die regelmäßige Durchführung von Wartung und Inspektion.

Für Oberflächenbeschädigungen, Bereifung der Räder, Beschädigungen durch gelöste Schrauben oder Muttern sowie ausgeschlagene Befestigungsbohrungen durch häufige Montagearbeiten ist die Garantie ausgeschlossen.

Diese Gebrauchsanleitung als Bestandteil des Produktes ist bei einem Benutzer- sowie Besitzerwechsel diesem mitzugeben.

Für die Bewertung unserer Produkte können Sie unser < Infozentrum > Bereich < PMS > auf unserer Webseite < [www.meyra.com](http://www.meyra.com) > benutzen.

Technische Änderungen im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns vor.



Dieses Produkt ist konform mit der EG-Richtlinie 93/42/EWG und erfüllt nach dem 25.05.2021 die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte..

## Gewährleistungs- / Garantie-Abschnitt

Bitte ausfüllen! Im Bedarfsfall kopieren und die Kopie an Ihren Fachhändler einsenden.

# Gewährleistung / Garantie








Modellbezeichnung:

Lieferschein-Nr.:

SN (siehe Typenschild):

Lieferdatum:

Stempel des Fachhändlers:

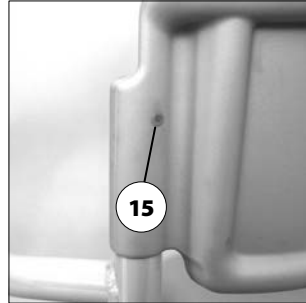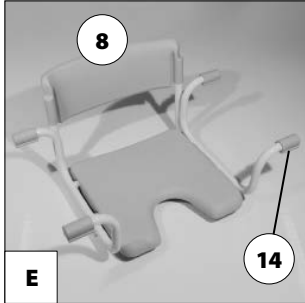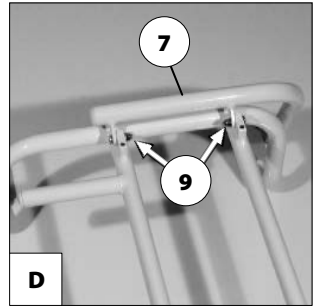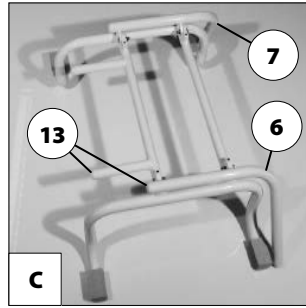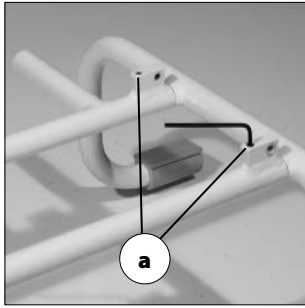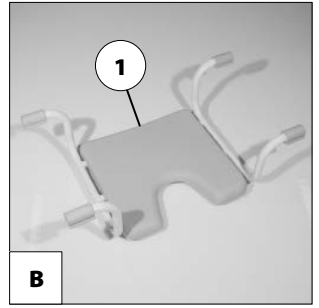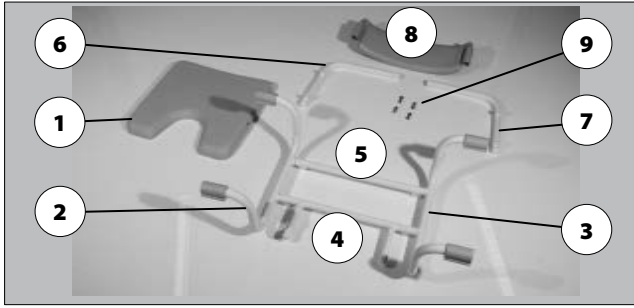

Ihr Fachhändler

---

---

**MEYRA GmbH**

Meyra-Ring 2



32689 Kalletal-Kalldorf  
DEUTSCHLAND



Tel +49 5733 922 - 311

Fax +49 5733 922 - 9311



info@meyra.de

www.meyra.de

---