

Bedienungsanleitung
TS-Aqua



Enjoy mobility.



Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkung	03
1.1.	Zeichen und Symbole	03
2.	Wichtige Sicherheitshinweise	04
2.1.	Indikation	05
2.2.	Kontraindikation	05
2.3.	Nutzungsdauer	05
2.4.	Zweckbestimmung	06
2.5.	Konformitätserklärung	06
2.6.	Verantwortlichkeit	06
3.	Lieferumfang und Prüfung der Lieferung	07
3.1.	Typenschild und Seriennummer	09
3.2.	Übersicht	10
4.	Zusammenbau/ Anpassungen	11
4.1.	Die Rückenlehne	11
4.2.	Der Sitz	11
4.3.	Die Armlehnen	12
4.4.	Die Beinstützen	12
4.5.	Räder, Bereifung und Bremsen	13
5	Fahrbetrieb	15
5.1.	Ein- und Aussteigen	15
5.2.	Fortbewegung	16
5.3.	Toilettenbenutzung	17
6	Transport	17
7	Lagerung/ Versand	17
8	Reparatur	17
9	Technische Daten	18
10	Pflegehinweise für den Benutzer	20
10.1.	Reinigung	20
10.2.	Desinfektion	20
11	Wartung	21
12	Entsorgung	21
13	Weitergabe des Duschhockers	22
14	Garantie	22

1. Vorbemerkung

Lieber Benutzer,

mit dem Erwerb Ihres Bischoff & Bischoff Duschoilettenrollstuhles aus der TS-Aqua Serie erhalten Sie ein deutsches Spitzenprodukt, das durch seine Variabilität neue Maßstäbe setzt.

Die Ihnen vorliegende Betriebsanleitung soll Ihnen dazu dienen, sich mit der Bedienung und Handhabung des Duschoilettenrollstuhls besser vertraut zu machen. Bitte lesen Sie diese vor der ersten Verwendung komplett durch.

1.1. Zeichen und Symbole



Wichtig! Bezeichnet besonders nützliche Informationen im jeweiligen Sachzusammenhang.



Achtung! Bezeichnet besonders sicherheitsrelevante Hinweise. Bedienungsanleitung beachten!

2. Wichtige Sicherheitshinweise

- Max. Benutzergewicht 120 kg!
- Benutzung des Duschoilettenrollstuhles nur im Innenbereich und mit Hilfe einer Begleitperson!
- Schieben nur auf ebenem und horizontalem Untergrund!
- Im Stand stets beide Bremsräder arretieren bzw. Feststellbremse betätigen!
- Weites, seitliches Herauslehnen vermeiden. Kippgefahr!
- Der Duschoilettenrollstuhl ist vor unbefugter Benutzung (besonders durch Kinder) zu sichern!

Der Einsatz eines Duschoilettenrollstuhls wird erforderlich, wenn das Benutzen oder Erreichen einer Toilette aufgrund der Behinderung nicht möglich ist.

2.1. Indikation

Gehunfähigkeit bzw. stark ausgeprägte Gehbehinderung durch:

- Lähmungen
- Gliedmaßenverlust
- Gliedmaßendefekt/-deformation
- Gelenkkontrakturen/Gelenkschäden
- sonstige Erkrankungen

Es ist eine Versorgung mit Duschoilettenrollstühlen angebracht, wenn die betroffene Person handelsübliche Toiletten, Duschen oder Bädewannen nicht ohne Rollstuhl erreichen kann und der vorhandene Raum barrierefrei gestaltet ist.

2.2. Kontraindikation

Der Duschoilettenrollstuhl ist ungeeignet für Personen:

- mit verminderter oder eingeschränkter Sitzfähigkeit
- mit starken Einschränkungen der kognitiven Fähigkeit

2.3. Nutzungsdauer

Die zu erwartende Lebensdauer beträgt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch, Einhaltung der Sicherheits-, Pflege- und Wartungshinweise bis zu 5 Jahre. Über diesen Zeitraum hinaus kann der Duschoilettenrollstuhl, bei einem sicheren Zustand des Produktes, weiter verwendet werden.

2.4. Zweckbestimmung

Der Duschoilettenrollstuhl ist ausschließlich zur Mobilitätssteigerung oder zum Transport von gehbehinderten Menschen hergestellt, bei denen aufgrund oben genannter Indikationen die Verwendung angezeigt ist. Er ist für den Innenraum zum Zweck der Kompensation der Mobilitätseinschränkungen der betroffenen Person bei der Durchführung der Körperpflege und des Ausscheidungsvorgangs ausgelegt. Dabei kann die Anwendung durch die betroffene Person selbst, bei Ausführung mit zwei großen Antriebsrädern hinten und / oder durch eine Begleitperson, bei der Ausführung mit 4 kleinen Lenkrädern durchgeführt werden. Das maximale Benutzergewicht von 120 kg darf nicht überschritten werden.

Zu beachten:

Eine Gewährleistung kann von uns nur übernommen werden, wenn das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird.

2.5. Konformitätserklärung

B+B erklärt als Hersteller des Produktes, dass die Duschoilettenrollstühle TS-Aqua Variante 1 und Variante 2 vollständig den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG entsprechen.

2.6. Verantwortlichkeit

Eine Gewährleistung kann von uns nur übernommen werden, wenn das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird, Änderungen, Erweiterungen, Reparaturen und Wartungsarbeiten nur von solchen Personen ausgeführt werden, die von uns dazu ermächtigt wurden und der Duschoilettenrollstuhl unter Beachtung aller Gebrauchshinweise benutzt wird.

3. Lieferumfang und Prüfung der Lieferung

Alle B+B Produkte werden einer ordnungsgemäßen Endkontrolle in unserem Hause unterzogen und mit dem CE-Zeichen versehen.

Die B+B Duschoilettenrollstühle werden in einem speziellen Karton mit Werkzeugset geliefert. Anlieferung und Einweisung des Rollstuhles erfolgen über den qualifizierten Sanitätsfachhandel.

Bei Versand per Bahn oder Spedition ist die Ware im Beisein des Überbringers sofort auf Transportschäden zu kontrollieren.

Sollte ein Schaden vorliegen, so ist folgendes zu beachten:

- Aufnahme des Tatbestandes
- Erstellung einer Abtretungserklärung; alle Forderungen aus dem Schaden werden an den Überbringer abgetreten.
- Rücksendungen der Tatbestandsaufnahme, des Frachtbriefes, sowie der Abtretungserklärung an die Firma Bischoff & Bischoff GmbH.

Im Falle eines Transportschadens...

1. Lassen Sie die Ware und Verpackung in jedem Fall unverändert, benutzen Sie die Ware noch nicht.
2. Melden Sie den Schaden beim Transportunternehmen schriftlich wie unten aufgeführt.
3. Setzen Sie sich anschließend mit unserem Kundenservice in Verbindung (Tel.: +49 (0)700/6000 7070).
4. Um Entschädigungsansprüche bei Transportversicherungen anmelden zu können, müssen Beauftragte der anliefernden Transportunternehmen rechtzeitig über einen Schaden informiert werden.

Äußerlich erkennbare Beschädigungen oder Verluste müssen vor Abnahme der Sendung durch den Anlieferer auf den Begleitpapieren bescheinigt werden.

Verdeckte Schäden, die erst beim Auspacken sichtbar werden, müssen sofort dem Transportunternehmen schriftlich gemeldet werden.

Bestimmte Fristen sind unbedingt einzuhalten:

- Paketdienste und Post innerhalb 24 Stunden
 - Bahn innerhalb 7 Tagen
 - Spediteure innerhalb 4 Tagen
- nach Empfang der Sendung.

Die Firma Bischoff & Bischoff GmbH benötigt die Originalbegleitpapiere der Sendung mit Schadensbestätigung.




Beachten Sie bitte die Textpassagen, die mit besonders gekennzeichnet sind.

Ohne diese Unterlagen ist eine Regulierung des Schaden durch den Versicherer nicht möglich!

3.1. Typenschild und Seriennummer

Das Typenschild und die Seriennummer befinden sich unter der Sitzfläche.

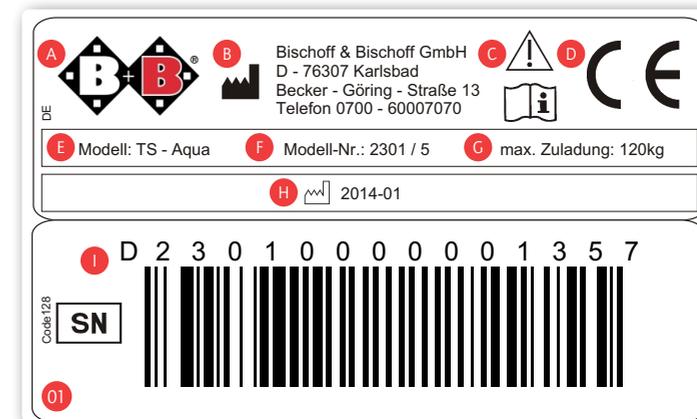

- A Herstellerlogo
- B Herstellerangabe
- C Wichtig - Gebrauchsanweisung beachten
- D CE-Zeichen
- E Modellbezeichnung
- F Modellnummer
- G max. Zuladung
- H Produktionsdatum
- I Seriennummer

3.2. Übersicht

Um Ihnen die Handhabung Ihres B+B Duschoilettenrollstuhls so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir die schriftlichen Ausführungen zusätzlich mit detaillierten Abbildungen dokumentiert.

Für die Bezeichnung und Zusammenwirken der einzelnen Baugruppen sollen Ihnen die folgenden Abbildungen als Hilfe dienen. (siehe Abb. 1a und 1b)



4. Zusammenbau/ Anpassungen

Ihr neuer B+B Duschoilettenrollstuhl wird vormontiert in einem B+B Originalkarton angeliefert. Um Beschädigungen beim Transport zu vermeiden, werden steckbare Anbauteile separat mitgeliefert.

4.1. Die Rückenlehne

Die Rückenlehne ist vollständig abnehmbar.

- Lösen Sie die beiden Sterngriffschrauben auf der Rückseite des Duschoilettenrollstuhls entgegen dem Uhrzeigersinn. (Abb. 2)
- Anschließend können Sie die Rückenlehne aus den beidseitigen Führungsschienen herausnehmen bzw. beim Zusammenbau hineinstecken. (Abb. 3)

4.2. Der Sitz

Anbringen / Abnehmen der Sitzfläche

- Bei Ihrem Duschoilettenrollstuhl können Sie die Sitzfläche abnehmen bzw. anbringen.
- Die Sitzfläche ist an den Rahmen des Duschoilettenrollstuhls durch 2 Klemmbögen angebracht.
- Um die Sitzfläche abzunehmen, müssen Sie die Sitzfläche an der vorderen Seite des Duschoilettenrollstuhls mit einem leichten Ruck anheben.

Die Sitzfläche kann wieder angebracht werden, indem Sie diese auf den Rahmen legen und an der Vorderseite nach unten drücken.



4.3. Die Armlehnen



Die Armlehnen des TS-Aqua können nach oben geklappt werden.



Achtung der TS-Aqua darf nicht an den Armlehnen angehoben werden!

4.4. Die Beinstützen

Beinstützen hochklappen



Die Beinstützen können durch einfaches Anheben hochgeklappt werden. Dies kann nützlich sein, um den TS-Aqua platzsparend zu verstauen.

Höhenverstellung der Beinstützen

Die Beinstützen in der Höhe verstellbar und somit auf die Unterschenkelgröße des Benutzers individuell angepasst werden.



- Lösen Sie die Handmutter.
- Ziehen Sie den Schraubbolzen heraus.
- Verschieben Sie die Beinstützen in der Führungsschiene bis zur gewünschten Lochposition.
- Eine geeignete Höhe der Beinstützen ist erreicht, wenn bei Auflage der Füße auf den Beinstützen die Oberschenkel des Anwenders vollständig auf der Sitzfläche aufliegen.
- Stecken Sie den Schraubbolzen in die entsprechende Lochposition.
- Abschließend ziehen Sie die Handmutter rechtsdrehend fest.
- Wiederholen Sie den Vorgang mit der anderen Beinstütze.

Schwenken und Abnehmen der Beinstützen

Die Beinstützen können zum leichten Ein- und Aussteigen und zur Lagerung zur Seite geschwenkt und abgenommen werden.

- Lösen Sie die Arretierung (Abb. 08).
- Schwenken Sie die Beinstützen nach außen bzw. innen.
- Zum Abnehmen schwenken Sie die Beinstützen zunächst nach außen, um sie dann nach oben aus der Halterung zu ziehen.
- Zur anschließenden Montage gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.



4.5. Räder, Bereifung und Bremsen

Räder und Bereifung

Auf Ihrem TS-Aqua Duschtoilettenrollstuhl sind die 5"- Rollen, wovon alle bremsbar sind (Variante 1), sowie auch die 24" Antriebsräder (Variante 2) serienmäßig mit einer PU-Bereifung ausgestattet. Bei Verschleiß (Profil abgefahren, Profiltiefe < 1 mm) oder Defekt, ist der autorisierte Fachhandel mit der Instandsetzung zu beauftragen.

Bremsrollen mit Richtungsfeststeller (Variante 1, Abb. 09)

Die Variante 1 des TS Aqua ist mit Bremsrollen an allen Lenkrädern ausgestattet. Treten Sie zur Betätigung der Fußtrittbremse den freiliegenden Teil der Trittflächen nach unten. Um die Bremsen zu lösen, treten Sie den radnahen Teil der Trittfläche nach unten.



24"-Greifreifenräder mit Steckachse (Variante 2, Abb. 10)

Um eine wesentliche Erleichterung für den Transport Ihres Duschtoilettenrollstuhls zu erreichen, sind die 24" Antriebsräder mit Steckachsen ausgestattet.

Die Antriebsräder sind aufgrund der Steckachsen ohne Werkzeug abnehmbar.



Abnehmen / Anbringen der Antriebsräder

- Mit dem Finger auf den Arretierknopf der Steckachse drücken und das Rad abziehen.
- Betätigen Sie wieder den Arretierknopf der Steckachse, um das Rad wieder aufzusetzen.
- Achten Sie beim Aufstecken darauf, dass die Steckachse richtig befestigt wurde!

Prüfen Sie nach dem Aufstecken den sicheren Sitz des Rades, indem Sie das Rad zu sich herziehen, ohne dabei den Arretierknopf der Steckachse zu betätigen!



Betätigung der Feststellbremse (Kniehebelbremse)

- Zum Feststellen der Bremse einfach den Bremshebel nach vorne drücken bis er einrastet. (Abb. 11 a)
- Um die Feststellbremse wieder zu lösen, einfach den Bremshebel nach hinten ziehen. (Abb. 11 b)



Einstellen der Feststellbremse (Abb. 12)

Die Bremswirkung kann durch Verschieben der Feststellbremse am Rahmen des Duschoilettenrollstuhls verändert werden. Die Kompaktbremsen wirken jeweils nur auf ein Antriebsrad!

Sollten Sie bemerken, dass nur noch eine unzureichende oder ungleichmäßige Bremswirkung vorhanden ist, haben Sie wie folgt vorzugehen:

- Prüfen Sie die Reifenprofiltiefe. Achten Sie dabei auch darauf, ob gleichmäßiger Abrieb vorliegt. Ist die Profiltiefe in der Spurmitte < 1 mm, muss der Reifen vom Fachhandel gewechselt werden.
- Lösen Sie zum Verstellen der Bremse die beiden Schrauben.
- Verschieben Sie nun die Bremse in der Rahmenführung soweit, bis der Abstand zwischen der Lauffläche des Rades und dem Bremsbolzen 16 mm beträgt.




Einstellungen am Bremssystem sollten nur vom autorisierten Fachhändler durchgeführt werden!

Ankipphilfe

In der Variante 2 mit Greifreifen kann eine Ankipphilfe montiert werden.

- Stecken Sie dazu die Ankipphilfe von unten in die hinteren Rahmenrohre und befestigen sie den Sicherungsbolzen.
- Zur Demontage muss zunächst der Sicherungsbolzen herausgezogen werden, anschließend ziehen Sie die Ankipphilfe heraus.

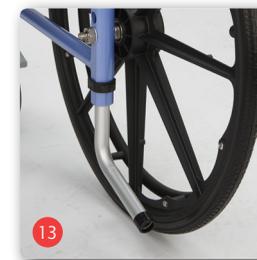

5. Fahrbetrieb

5.1. Ein- und Aussteigen

Der TS-Aqua bietet Ihnen die Möglichkeit auf einfache Weise ein bzw. aussteigen. Die Fußplatte und die beiden Armlehnen sind hochklappbar.

Ein- und Aussteigen von der Seite:

- Fahren Sie den Duschoilettenrollstuhl möglichst dicht an die Sitzfläche auf der Sie sitzen heran.
- Vergewissern Sie sich über die sichere und stabile Lage der gegenwärtigen Sitzfläche.
- Sichern Sie den Duschoilettenrollstuhl durch Betätigung der Feststellbremsen.
- Klappen Sie Armlehne, die sich auf der Seite der gegenwärtigen Sitzgelegenheit befindet nach oben.
- Anschließend klappen Sie die Fußplatte nach oben.
- Nun rutschen Sie seitlich auf die Sitzfläche des TS-Aqua.
- Achten Sie bitte darauf, dass Sie so weit wie möglich hinten im Sitz sitzen.
- Abschließend können Sie wieder Armlehne, sowie die Fußplatte wieder in ihre Ausgangsposition zurückklappen.

Ein- und Aussteigen von vorn:

- Fahren Sie den Duschoilettenrollstuhl möglichst dicht frontal an die Sitzfläche heran.
- Sichern Sie den Duschoilettenrollstuhl durch Betätigung der Feststellbremse.
- Klappen die Fußplatte nach oben.
- Vergewissern Sie sich, dass die zukünftige Sitzfläche sicher und stabil steht.
- Nun rutschen Sie durch eine Körperdrehung auf die Sitzfläche. Achten Sie bitte darauf, dass Sie so weit wie möglich hinten im Sitz sitzen.

Anschließend klappen Sie die Fußplatte wieder herunter und legen Ihre Füße darauf ab.

5.2. Fortbewegung

Die Fortbewegung mit dem Duschoilettenrollstuhl erfolgt bei der Variante 1 durch eine Begleitperson. Die Begleitperson kann mittels Schiebegriffe den Duschoilettenrollstuhl bewegen, steuern und bremsen.

Die Variante 2 des Duschoilettenrollstuhls ermöglicht zusätzlich zum Schiebetrieb mit Helfer, eine selbstständige Fortbewegung des Benutzers mittels Greifreifen an den Antriebsrädern. Führen Sie in diesem Fall die ersten Fahrversuche vorsichtig durch, bis Sie sich an den Duschoilettenrollstuhl und sein Fahrverhalten gewöhnt haben.

Duschoilettenrollstühle haben nur eine eingeschränkte Kipp- und Rutschsicherheit. Besondere Vorsicht ist geboten beim Bremsen, Anfahren oder Wenden an Steigungen bzw. Gefällen. Extremes Herauslehnen aus dem Duschoilettenrollstuhl vergrößert zudem die Kippgefahr.

5.3. Toilettenbenutzung

Benutzung des Toiletteneimers

Um den Toiletteneimer vom Duschoilettenrollstuhl zu entnehmen, ziehen Sie diesen von der Rückseite aus den Führungsschienen heraus.

Benutzung auf dem WC

Der Duschoilettenrollstuhl ermöglicht die Benutzung des WC ohne Toiletteneimer. Entnehmen Sie hierfür zuerst den Toiletteneimer, wie oben beschrieben. Nun können Sie ihren TS-Aqua über jedes standardisierte WC-Becken fahren.



6. Transport

Um den Rollstuhl für den Transport so handlich wie möglich zu machen, müssen alle abnehmbare Teile (Antriebsräder und Rückenlehne) entfernt, sowie die Fußplatte angeklappt werden.

7. Lagerung / Versand

Falls der Rollstuhl eingelagert oder versendet werden soll, müssen alle einsteckbare und nicht befestigten Teile entfernt und in passenden Kartons einzeln verpackt werden. Die einzeln verpackten Teile können dann zusammen in einem größeren Karton verpackt werden. Empfehlenswert ist es die Originalverpackung aufzubewahren und für diese Zwecke einzulagern, so dass sie im Bedarfsfall verfügbar ist. Dann ist Ihr Rollstuhl optimal geschützt gegen Umwelteinflüsse während der Lagerung oder des Transportes.

8. Reparatur

Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nur von autorisierten Partnern (Sanitätshäuser oder Fachhändler) durchgeführt werden. Einen Partner in Ihrer Nähe erfragen Sie bitte telefonisch bei unserem Kundenservice Tel.: +49 (0)700/6000 7070.

9. Technische Daten

Produktbezeichnung:	TS-Aqua
Modell:	Variante 1 mit Bremsrollen Variante 2 mit Greifreifen
Artikelnummer:	2300000000 (Var. 1) 2310000000 (Var. 2)

Abmessungen

Gesamtlänge mit Beinstützen (mm):	925 (Var. 1) 1100 (Var. 2)
Breite (mm):	560 (Var. 1) 630 (Var. 2)
Länge ohne Beinstützen (mm):	600 (Var. 1) 775 (Var. 2)
Höhe (mm):	990 - 1040
Sitzwinkel (°):	0
Effektive Sitztiefe (mm):	430
Sitzbreite (mm):	460
Sitzhöhe (mm):	505 - 555 (je 25 mm)
Rückenlehnenhöhe (mm):	480
Unterschenkellänge (mm):	410 - 535 (je 25 mm)
Höhe der Armlehne (mm):	210
Länge der Armlehne (mm): (von der Rückenlehne)	330
Länge der Armlehne (mm):	245
Breite der Armlehnenpolster (mm):	45

Gewichte

Benutzergewicht (kg):	120
Leergewicht (kg):	14,40 (Var. 1) 19,20 (Var. 2) (inkl. Eimer)

Reifen

Greifreifendurchmesser (mm):	520
Bereifung hinten:	Bremsrolle 5"x30mm 24"x 1 1/8" PU Lauffläche und Kunststofffelge Bremsrolle 5"x30mm
Bereifung vorne:	

Materialien

Rahmen:	Aluminium lackiert
Anbauteile	Kunststoff (PU und PA Glasfaserverstärkt)
Sitzpolster	PU gepolstert, 430x460x40 (mit Hygieneausschnitt)
Rückenpolster	PU gepolstert 230x460x30
Armlehnenpolster	PU gepolstert 245x45x20

10. Pflegehinweise für den Benutzer

10.1. Reinigung

Die Reinigung der Sitz- und Rückenmaterialien kann mit warmem Wasser unter Zuhilfenahme eines Schwamms und/oder einer weichen Bürste vorgenommen werden. Bei hartnäckiger Verschmutzung kann dem Wasser ein handelsübliches Reinigungsmittel zugesetzt werden.



Hinweis: Verwenden Sie keines Falls aggressive Reinigungsmittel wie z.B. Lösungs- / Scheuermittel oder harte Bürsten.

Kunststoffteile pflegen Sie am besten mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger. Beachten Sie bitte die Produktinformationen des Reinigungsmittels.

10.2. Desinfektion

Der Duschoilettenrollstuhl ist mit einem haushaltsüblichen Desinfektionsmittel desinfizierbar. Verwenden Sie zugelassene Sprüh-Desinfektionsmittel oder Wisch-Desinfektionsmittel auf alkoholischer Basis.



Eine Liste der vom Robert-Koch-Institut zugelassenen Desinfektionsmittel finden Sie unter www.rki.de.

11. Wartung

Ihr Duschoilettenrollstuhl ist für eine lange und komfortable Nutzung aus hochwertigen Materialien hergestellt. Jedes Produkt wird eingehend geprüft, bevor es unser Haus verlässt. Dennoch kann es vorkommen, dass ein Defekt auftritt. Sollten Sie eine Störung an Ihrem Duschoilettenrollstuhl feststellen, darf er nicht mehr benutzt werden. Wenden Sie sich zur Reparatur an den Sanitätsfachhändler, der Ihnen das Produkt geliefert hat. Er wird Ihnen gerne behilflich sein. Wir empfehlen weiterhin, den Duschoilettenrollstuhl mindestens einmal jährlich warten zu lassen. Ihr Fachhändler erhält von uns einen Wartungsplan und weitere zur Inspektion notwendige Unterlagen. Für Ihre Fragen zum Ablauf stehen wir Ihnen mit unserem Kundendienst unter der kostenfreien Rufnummer 0700/6000 7070 gerne mit Rat und Tat zur Seite.



Sie müssen Ihren Duschoilettenrollstuhl regelmäßig gemäß Wartungsplan überprüfen und als einwandfrei befinden.

12. Entsorgung

Wenn Ihr Duschoilettenrollstuhl nicht mehr verwendet wird und entsorgt werden soll, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Wenn Sie die Entsorgung selber übernehmen möchten, erkundigen Sie sich bei ortsansässigen Recyclingunternehmen nach den Vorschriften Ihres Wohnorts.

13. Weitergabe des Duschoilettenrollstuhls

Der Duschoilettenrollstuhl ist für einen Wiedereinsatz geeignet. Bevor er an einen anderen Nutzer weitergegeben wird, ist er durch den Fachhändler zu warten und hygienisch aufzubereiten. Bei der Weitergabe des Duschoilettenrollstuhl denken Sie bitte daran, diese Bedienungsanleitung und die Anschrift Ihres Fachhändlers dem neuen Nutzer zu übergeben.

14. Garantie

Garantieleistungen beziehen sich auf alle Mängel des Duschoilettenrollstuhls, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Bei Beanstandungen ist die vollständig ausgefüllte Garantieurkunde mit einzureichen.



Für dieses Produkte übernehmen wir die gesetzliche Garantie von 2 Jahren.

Darüber hinaus beachten Sie bitte die B+B Pflege-, Gewährleistungs-, Hygiene- und Wartungshinweise. Diese werden Ihnen von Ihrem Fachhändler gerne zur Verfügung gestellt.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, sowie unsachgemäß durchgeführte Wartungsarbeiten und/oder technische Änderungen und Ergänzungen (Anbauten) ohne Zustimmung der Bischoff & Bischoff GmbH führen zum Erlöschen sowohl der Garantie als auch der Produkthaftung allgemein.

Garantie Urkunde

(Achten Sie auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen)

Produkt: Duschoilettenrollstuhl TS-Aqua Var. 1 + 2

Serien Nummer: *

* (vom Händler einzutragen)

Fachhändler:

Datum & Stempel

*Hinweisschilder befinden sich auf dem Seitenrahmen

Hinweis!

Trotz sorgfältiger Recherche und Bearbeitung können sich in unseren Bedienungsanleitungen fehlerhafte Angaben eingeschlichen haben. Die jeweils aktuelle Version der Bedienungsanleitungen finden Sie im Downloadbereich auf unserer Website: www.bischoff-bischoff.com

Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Göring-Straße 13

D-76307 Karlsbad

www.bischoff-bischoff.com

