

Toilettensitzerhöhung

Modelle 3011522 / 3011532, Molett

Montage- / Gebrauchsanleitung

BEDEUTUNG DER VERWENDETEN KENNZEICHNUNGEN

Farblich hinterlegte Sicherheitshinweise sind zwingend zu befolgen!

-  Dieses Symbol steht für Hinweise und Empfehlungen.
- [] Verweis auf eine Bildnummer.
- () Verweis auf ein Funktionselement innerhalb eines Bildes.

EINLEITUNG

Lesen und beachten Sie vor der erstmaligen Inbetriebnahme dieses Dokument.

Ihr Fachhändler sollte Sie zusätzlich in die Benutzung Ihrer Toilettensitzerhöhung einweisen.

Die vorliegende Montage- / Gebrauchsanleitung soll Ihnen helfen, sich mit der Handhabung der Toilettensitzerhöhung vertraut zu machen sowie Unfälle zu vermeiden.

-  Die abgebildeten Ausstattungsvarianten können von Ihrem Modell abweichen.

Benutzer mit Sehbehinderung finden die PDF-Dateien zusammen mit weiteren Informatio-

nen über unsere Produkte auf unserer Webseite unter:

< www.meyra.com >.

-  Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Fachhändler.

Alternativ können sich Benutzer mit Sehbehinderung die Dokumentationen von einer Hilfsperson vorlesen lassen.

Informieren Sie sich regelmäßig über die Produktsicherheit und mögliche Rückrufaktionen unserer Produkte im < *Infozentrum* > auf unserer Webseite:

< www.meyra.com >.

Wir haben ein Produkt entwickelt, das die technischen und gesetzlichen Vorgaben für Medizinprodukte erfüllt. Für die Mitteilung eines dennoch nicht auszuschließenden schwerwiegenden Vorfalles nutzen Sie bitte unsere Emailadresse < info@meyra.de > und informieren die zuständige Behörde Ihres Mitgliedstaates.

MODELLAUFZÄHLUNG

Diese Montage- / Gebrauchsanleitung ist für folgende Modelle gültig:

Modell 3011522	Toilettensitzerhöhung
Modell 3011532	Toilettensitzerhöhung mit Deckel

INDIKATIONEN / KONTRAINDIKATIONEN

Bei allergischen Reaktionen, Hautrötungen und/oder Druckstellen bei der Verwendung der Toilettensitzerhöhung ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen.

Die Toilettensitzerhöhung dient zur Verbesserung der selbstständigen Ausübung des Toilettengangs für Personen mit Mobilitätseinschränkungen (eingeschränkte Fähigkeit des Hinsetzens und Aufstehens, bzw. Einschränkungen des Sitzens in einer tiefen Position).

Die Toilettensitzerhöhung darf nicht eingesetzt werden bei:

- Unfähigkeit zum Sitzen oder Aufstehen.
- Hautunverträglichkeiten gegenüber Polypropylen.

Die Toilettensitzerhöhung darf nur mit Hilfsperson eingesetzt werden bei:

- Unkontrollierbaren Gleichgewichts- bzw. Bewegungsstörungen und/oder Wahrnehmungsstörungen.
- Fehlenden Fähigkeiten selbstständig aufzustehen.
- Kognitiven Einschränkungen und mentaler Retardierung, die ein selbstständiges Nutzen der Toilettensitzerhöhung ausschließen.
- Einfluss beeinträchtigender Medikamente (Rücksprache mit Arzt oder Apotheker).

☞ Zu diesen und weiteren möglichen Risiken mit diesem Produkt fragen Sie Ihren Arzt, Therapeuten oder Fachhändler.

EMPFANG

Alle Produkte werden bei uns im Werk auf Fehlerfreiheit geprüft und in Spezialkartons verpackt.

- ☞ Wir möchten Sie dennoch bitten, das Fahrzeug sofort nach Erhalt – am besten im Beisein des Überbringers – auf eventuelle während des Transportes aufgetretene Schäden zu überprüfen.
- ☞ Die Verpackung der Toilettensitzerhöhung sollte für einen eventuell später notwendigen Transport aufbewahrt werden.

ZWECKBESTIMMUNG

Die Toilettensitzerhöhung dient als Sitzhöhung zur Erleichterung des Toilettengangs für erwachsene Personen.

VERWENDUNG

Die Toilettensitzerhöhung dient als Sitzhilfe beim Hinsetzen und Aufstehen in Verbindung mit einem handelsüblichen WC.

KOMBINATION MIT HERSTELLERFREMDEN PRODUKTEN

Jede Kombination Ihrer Toilettensitzerhöhung mit nicht von uns gelieferten Komponenten stellt generell eine Veränderung Ihrer Toilettensitzerhöhung dar. Erkundigen Sie sich bei uns, ob es eine gültige Kombinationsfreigabe von uns gibt.

WIEDEREINSATZ

Ihre Toilettensitzerhöhung ist für einen Wiedereinsatz geeignet. Vor jedem Wiedereinsatz ist die Toilettensitzerhöhung einer kompletten Inspektion zu unterziehen.

Die für den Wiedereinsatz erforderlichen hygienischen Maßnahmen sind nach einem validierten Hygieneplan durchzuführen und müssen eine Desinfektion einschließen.

In Abhängigkeit des Wartungsergebnisses ist ein mehrfacher Wiedereinsatz möglich.

LEBENSDAUER

Wir gehen bei ihrer Toilettensitzerhöhung von einer zu erwartenden durchschnittlichen Produktlebensdauer von 4 Jahren aus, soweit die Toilettensitzerhöhung innerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs eingesetzt wird und sämtliche Wartungs- und Servicevorgaben eingehalten werden.

Die Lebensdauer ihrer Toilettensitzerhöhung ist sowohl von der Benutzungshäufigkeit, der Einsatzumgebung und der Pflege abhängig.

Durch den Einsatz von Ersatzteilen lässt sich die Lebensdauer der Toilettensitzerhöhung verlängern. Ersatzteile sind im Regelfall bis zu 5 Jahre nach Fertigungsauslauf erhältlich.

Die angegebene Lebensdauer stellt keine zusätzliche Garantie dar.

LIEFERUMFANG

- (I) 1x Toilettensitzerhöhung
- 1x Montage- / Gebrauchsanleitung



MONTAGEANLEITUNG

Die Durchführung der folgenden Montage ist von einem qualifizierten Fachmann durchzuführen.

Während der gesamten Montage auf Klemmstellen achten. – Quetschgefahr!

Den Arbeitsbereich während der Montage sauber halten!

Die Toilettensitzerhöhung wird vormontiert geliefert. Die Befestigungsklammern müssen noch eingesetzt werden.

1. Entnehmen Sie die Einzelteile dem Karton.
2. Stecken Sie die Befestigungsschraube und die Halterung zusammen [1 auf Seite 10]+[2 auf Seite 10].
3. Schieben Sie die Befestigungsschraube und die Halterung in die Aufnahme [3 auf Seite 10].
4. Schrauben Sie die Befestigungsschrauben ein paar Umdrehungen ein [4 auf Seite 10].
5. Klappen Sie den Standardsitz mit Deckel hoch und setzen Sie die Toilettensitzerhöhung mittig auf die Toilettenkeramik.
6. Fixieren Sie die Toilettensitzerhöhung handfest mit den seitlichen Befestigungsschrauben.

7. Prüfen Sie zum Abschluss, ob alle Befestigungsschrauben fest sitzen.
 - ☞ Ggf. die Befestigungsschrauben nachdrehen.
8. Die Toilettensitzerhöhung ist nun einsatzbereit.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Sicherheitshinweise

Stellen / setzen Sie sich nicht auf den Deckel.

Stützen Sie sich gleichmäßig mit beiden Händen auf den Brillenrand ab.

Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsschrauben gleichmäßig handfest angezogen sind.

Achten Sie auf die feste Klemmung der Befestigungsschrauben an der Toilettenkeramik.

Beachten Sie, dass die Toilettensitzerhöhung nicht fest mit der Toilettenkeramik verschraubt, sondern nur verklemmt ist.

Lassen Sie beschädigte Teile sofort durch Ihren Fachhändler austauschen.

Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass die Anti-Rutschelemente an den Befestigungsklammern in einem einwandfreien Zustand sind!

Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass der Deckel nicht ungewollt herunterfallen kann. – Verletzungsgefahr.

Überzeugen Sie sich vor der Benutzung von dem gebrauchsfähigen Zustand der Toilettensitzerhöhung. – Unfallgefahr!

Bei direkter Wärmestrahlung (Sonnenlicht, Wärmequellen etc.) kann sich die Toilettensitzerhöhung auf Temperaturen über 41 °C erhitzen.

– Es besteht Verletzungsgefahr bei Berühren durch unbedeckte Hautpartien!

Nach dem Reinigen die korrekte Funktion Ihrer Toilettensitzerhöhung prüfen.

Die Fa. MEYRA kann im Sinne der Produkthaftung nicht für Schäden oder Risiken haftbar gemacht werden, die durch unbeaufsichtigte Kinder im Zusammenhang mit der Toilettensitzerhöhung verursacht werden!

Ihre Toilettensitzerhöhung kann entflammbare Materialien enthalten.

Das Rauchen beim Umgang mit der Toilettensitzerhöhung ist verboten.

Zur Vermeidung eines Sturzrisikos empfehlen wir die zusätzliche Montage von Haltegriffen.

REINIGUNG

Die Kunststoffteile werden durch nichtionische Tenside sowie durch Lösungsmittel und insbesondere Alkohole angegriffen.

Die Toilettensitzerhöhung ist nicht zur Reinigung in Reinigungsautomaten geeignet!

Die Toilettensitzerhöhung mit einem geeigneten Reinigungstuch, in warmen Wasser getränkt und unter Verwendung eines ph-neutralen Handwaschmittels, säubern.

Mit klarem Wasser nachwischen und trocknen lassen.

DESINFEKTION

Wird die Toilettensitzerhöhung von mehreren Personen genutzt (z. B. im Pflegeheim), so ist die Anwendung eines handelsüblichen Desinfektionsmittels vorgeschrieben.

☞ Vor der Desinfektion ist die Toilettensitzerhöhung zu reinigen.

☞ Eine Sprüh- oder Wischdesinfektion ist mit geprüften und anerkannten Desinfektionsmitteln zugelassen.

Auskünfte über geprüfte und anerkannte Desinfektionsmittel und -verfahren kann Ihnen Ihre nationale Einrichtung für Gesundheitsschutz geben.

- Bei der Anwendung von Desinfektionsmitteln kann es vorkommen, dass u. U. Oberflächen durch die Anwendung in Mitleidenschaft gezogen werden, die die längerfristige Funktionsfähigkeit der Bauteile einschränken können.
- Dabei sind die vom Hersteller vorgegebenen Anwendungshinweise zu beachten.

REPARATUREN

Reparaturen sind grundsätzlich vom Fachhändler durchzuführen.

Instandsetzung

Zur Durchführung von Instandsetzungsarbeiten wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Fachhändler. Er ist in die Ausführung der Arbeiten eingewiesen.

Service

Falls Sie Fragen haben sollten oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, der Beratung, Service sowie Reparaturen übernehmen kann.

Ersatzteile

Ersatzteile sind nur über einen Fachhändler zu beziehen. Im Falle einer Reparatur sind nur Original-Ersatzteile zu verwenden!

- Bauteile von Fremdfirmen können Störungen hervorrufen.


Eine Ersatzteilliste mit den entsprechenden Artikelnummer finden Sie im Kapitel *Ersatzteilliste* auf Seite 9.

Für eine korrekte Ersatzteil-Lieferung ist in jedem Fall die entsprechende Serien-Nr. (SN) der Toilettensitzerhöhung mit anzugeben! Diese finden Sie auf dem Typenschild.

Bei jeder vom Fachhändler durchgeführten Reparatur an der Toilettensitzerhöhung sind ergänzende Informationen wie z. B. Montage-/Bedienungshinweise der Bedienungsanleitung der Toilettensitzerhöhung beizulegen sowie das Datum der Änderung festzuhalten und bei Ersatzteilbestellungen mit anzugeben.

Dadurch soll bei späteren Ersatzteilbestellungen eine falsche Bestellangabe verhindert werden.

ENTSORGUNG

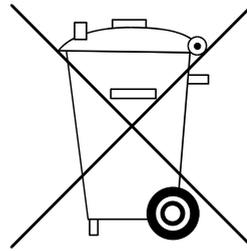

Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

Erfragen Sie bitte bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.

WARTUNG

Eine mangelhafte oder vernachlässigte Pflege und Wartung der Toilettensitzerhöhung führt zur Einschränkung der Produzentenhaftung.

Wartungsarbeiten

Der folgende Wartungsplan stellt einen Leitfaden für die Durchführung der Wartungsarbeiten dar.

- Der Wartungsplan gibt keinen Aufschluss über den tatsächlich notwendigen, an der Toilettensitzerhöhung festgestellten Arbeitsumfang.

Wartungsplan

WANN	WAS	ANMERKUNG
Vor der Benutzung	Korrekte Klemmung auf der Toilettenkeramik prüfen und sicher stellen.	Prüfung selbst oder durch Hilfsperson durchführen. Klemmung ggf. korrigieren. – Unfallgefahr!
Nach der Benutzung	Reinigung	Reinigung selbst oder durch Hilfsperson durchführen.
Alle 6 Monate (je nach Gebrauchshäufigkeit)	Brille / Deckel auf Beschädigung / Verschleiß prüfen.	Prüfung selbst oder durch Hilfsperson durchführen.
	Befestigungsklammern auf Beschädigung prüfen.	Prüfung selbst oder durch Hilfsperson durchführen. Bei Beschädigung umgehend von Ihrem Fachhändler ersetzen lassen. – Unfallgefahr!
Empfehlung des Herstellers: Alle 12 Monate (je nach Gebrauchshäufigkeit)	Sicherheitsinspektion	Vom Fachhändler durchzuführen.

TECHNISCHE DATEN

Alle Angaben innerhalb der < *Technischen Daten* > beziehen sich auf die Standard-Ausführung.

Maßtoleranz ± 15 mm, $\pm 2^\circ$.

Angewendete Normen

Die Toilettensitzerhöhung entspricht der Norm:

- ISO 17966: 2016

Angaben nach ISO für Modell 301522, Toilettensitzerhöhung

Höhe	160 mm
Sitzerhöhung	100 mm
Breite (ohne Verschraubung)	380 mm
Tiefe	430 mm
Öffnungsmaße	215 x 270 mm
Klembreite	325 – 405 mm
max. Benutzergewicht	150 kg
Gewicht	1,0 kg
Material	PP
Umgebungstemperatur	+10 °C bis + 40 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis + 80 °C

Angaben nach ISO für Modell 3011532, Toilettensitzerhöhung mit Deckel

Höhe	160 mm
Sitzerhöhung	100 mm
Breite (ohne Verschraubung)	375 mm
Tiefe	410 mm
Öffnungsmaße	215 x 270 mm
Klemmbreite	325 – 405 mm
max. Benutzergewicht	150 kg
Gewicht	1,3 kg
Material	PP
Umgebungstemperatur	+10 °C bis + 40 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis + 80 °C

Typenschild

Das Typenschild befindet sich an der Unterseite der Toilettensitzerhöhung.

Bedeutung der Symbole auf dem Typenschild



Hersteller



Bestellnummer



Seriennummer



Produktionsdatum



zul. Benutzergewicht

Bedeutung der Symbole auf dem Typenschild



Bedienungsanleitung beachten



Medizinprodukt

GEWÄHRLEISTUNG / GARANTIE

Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung sowie unsachgemäß durchgeführte Wartungsarbeiten als auch insbesondere technische Änderungen und Ergänzungen (Anbauten) ohne unsere Zustimmung führen zum Erlöschen sowohl der Gewährleistungs- und Garantieansprüche als auch der Produkthaftung allgemein.

Für dieses Produkt übernehmen wir im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen die gesetzliche Gewährleistung und gegebenenfalls ausgesprochene bzw. vereinbarte Garantien. Für Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche wenden Sie sich bitte mit dem nachfolgenden GEWÄHRLEISTUNGS- / GARANTIE-ABSCHNITT und den darin benötigten Angaben über die Modellbezeichnung, die Lieferschein-Nr. mit Lieferdatum und Seriennummer (SN) an Ihren Fachhändler.

Die Seriennummer (SN) ist vom Typenschild abzulesen.

Voraussetzung für die Anerkennung von Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüchen ist in jedem Fall der bestimmungsgemäße Gebrauch des Produktes, die Verwendung von Original-Ersatzteilen durch Fachhändler sowie die regelmäßige Durchführung von Wartung und Inspektion.

Für Oberflächenbeschädigungen, Bereifung der Räder, Beschädigungen durch gelöste Schrauben oder Muttern sowie ausgeschlagene Befestigungsbohrungen durch häufige

Montagearbeiten ist die Garantie ausgeschlossen.

Diese Bedienungsanleitung als Bestandteil des Produktes ist bei einem Benutzer- sowie Besitzerwechsel diesem mitzugeben.

Für die Bewertung unserer Produkte können Sie unser < *Infozentrum* > Bereich < *PMS* > auf unserer Webseite < www.meyra.com > benutzen.

Technische Änderungen im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns vor.

ERSATZTEILLISTE

Pos.-Nr.	Artikel-Nr.	Stück	Artikelbezeichnung
-	291 152 000	1	Anti-Rutschgummi für Klemmbacken
-	291 152 001	1	Klemmbacke ohne Anti-Rutschgummi und Befestigungsschraube
-	291 152 002	1	Befestigungsschraube

Gewährleistungs- / Garantie-Abschnitt

Bitte ausfüllen! Im Bedarfsfall kopieren und die Kopie an Ihren Fachhändler einsenden.

Gewährleistung / Garantie

Modellbezeichnung:

Lieferschein-Nr.:


SN (siehe Typenschild):

Lieferdatum:

Stempel des Fachhändlers:



Dieses Produkt ist konform mit der EG-Richtlinie 93/42/EWG und erfüllt nach dem 25.05.2021 die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte..

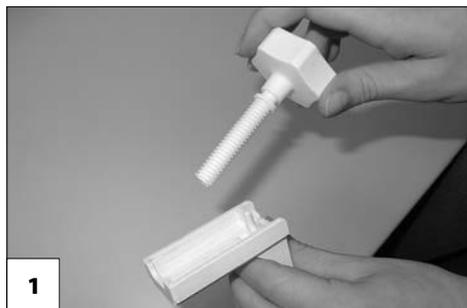

NOTIZEN

Ihr Fachhändler / Your specialist dealer

MEYRA GmbH

Meyra-Ring 2



32689 Kalletal-Kalldorf
GERMANY



Tel +49 5733 922 - 311
Fax +49 5733 922 - 9311



info@meyra.de

www.meyra.de
