

follow-me momo.



Gebrauchsanleitung.

follow-me momo. Die clevere Eltern-Kind-Tandemkupplung für Schuchmann-Dreiräder.


schuchmann®

Vielen Dank.



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

an dieser Stelle möchten wir Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und den Erwerb unseres Produkts danken. Wir möchten Sie bitten, vor der ersten Inbetriebnahme des Produkts, die Gebrauchsanleitung aufmerksam durchzulesen und zu beachten. Berücksichtigen Sie bitte, dass Hinweise und Darstellungen in dieser Gebrauchsanleitung auf Grund der Ausstattung von Ihrem Produkt abweichen können. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Wichtige Information!

Stellen Sie sicher, dass diese Gebrauchsanleitung bei dem Produkt verbleibt.

Ihr **schuchmann**-Team



1. Vorbereitung.	04
1.1 Auslieferung.....	04
1.2 Sicherheitsmaßnahmen vor dem Gebrauch.....	04
1.3 Sicheres Entsorgen.....	04
1.3.1 Verpackung.....	04
1.3.2 Produkt.....	04
1.4 Anbringungsort der Gebrauchsanleitung.....	04
2. Produktbeschreibung.	05
2.1 Allgemeine Informationen.....	05
2.2 Anwendungsbereiche, bestimmungsgemäße Verwendung.....	05
2.3 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung / Warnhinweise.....	05
2.4 Fahrverhalten.....	07
2.5 Ausstattung Grundmodell.....	08
2.6 Produktübersicht.....	08
3. Anforderung an das Zugfahrrad.	09
4. Montage der Eltern-Kind-Tandemkupplung.	09
4.1. Wichtige Information zum Umgang mit Schnellspannern.....	09
4.1.1 Schnellspanner am Zugfahrrad tauschen.....	10
4.2 Vollachsadapter montieren.....	11
4.3 Adapter für Nabenschaltung.....	11
4.3.1 Montage Nabenschaltadapter.....	12
4.4 Montage Steckachsadapter.....	13
4.5 follow-me momo. montieren.....	14
5. Vorbereitung des momo dreirad.	15
5.1 Achsverlängerung montieren.....	15
5.2 Aufnahmeschelle am Dreirad-Unterrohr befestigen.....	15
6. follow-me momo. einrichten (auf Raddruchmesser des Dreirades) ..	16
6.1 Klemmplatte auf Dreiradgröße einstellen.....	16
6.2 Position der Aufnahmeschelle einstellen.....	17
7. An- und Abkoppeln unterwegs.	18
8. Aufhängebügel für Gepäckträger mit „Top-Light“ (optional).	19
9. Hinweise zur Nutzung des follow-me momo. in Größe 3.	20
9.1 Einrichten des follow-me momo. in Größe 3.....	21
9.2 Fahren ohne Dreirad mit dem follow-me momo. in Größe 3.....	22
9.2.1 Sicherung des follow-me momo. gegen Verdrehen.....	22
10. Reinigen und Instandhalten.	23
10.1 Pflege.....	23
10.2 Instandhaltung.....	23
10.3 Ersatzteile.....	23
11. Technische Daten.	23
12. Gewährleistung.	24
13. Identifizierung.	24
13.1 Produktversion.....	24
13.2 Ausgabe des Dokuments.....	24
13.3 Name und Adresse des Herstellers, ausliefernder Fachhändler.....	24



1. Vorbereitung.

1.1 Auslieferung

Bitte überprüfen Sie das Produkt bei Erhalt auf Vollständigkeit, Fehlerfreiheit und achten Sie auf eventuelle Transportschäden. Überprüfen Sie die Ware in Gegenwart ihres Überbringers. Sollten Transportschäden auftreten, veranlassen Sie bitte eine Bestandsaufnahme (Feststellung der Mängel) in Gegenwart des Überbringers. Senden Sie bitte eine schriftliche Reklamation an den zuständigen Fachhändler.

1.2 Sicherheitsmaßnahmen vor dem Gebrauch

Die korrekte Benutzung des Produkts erfordert eine genaue und sorgfältige Einweisung des Anwenders bzw. der Begleitperson. Wir möchten Sie bitten, vor der ersten Inbetriebnahme des Produkts, die Gebrauchsanleitung aufmerksam durchzulesen und zu beachten. Es besteht die Möglichkeit, dass sich Produktteile, die mit der Haut in Berührung kommen können, durch Sonneneinstrahlung aufheizen. Decken Sie diese Stellen ab oder schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.

1.3 Sicheres Entsorgen

Zur Erhaltung und zum Schutz der Umwelt, der Verhinderung von Umweltverschmutzung, und um die Wiederverwertung von Rohstoffen (Recycling) zu verbessern, beachten Sie bitte die Entsorgungshinweise der **Punkte 1.3.1** und **1.3.2**.

1.3.1 Verpackung

Die Verpackung des Produkts sollte für einen eventuell später notwendigen Transport aufbewahrt werden. Falls Sie das Produkt zur Reparatur oder im Gewährleistungsfall zu uns zurückschicken müssen, verwenden Sie bitte nach Möglichkeit den Originalkarton, damit das Produkt optimal verpackt ist. Führen Sie ansonsten die Verpackungsmaterialien nach ihrer Art dem Recycling zu.



Lassen Sie die Verpackungsmaterialien nicht unbeaufsichtigt, da sie mögliche Gefahrenquellen sind.

1.3.2 Produkt

Führen Sie nach Ablauf des Produktlebenszyklus die für das Produkt verwendeten Rohstoffe nach ihrer Art dem Recycling zu.

1.4 Anbringungsort der Gebrauchsanleitung

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf und stellen Sie sicher, dass diese bei einem möglichen Wiedereinsatz beim Produkt verbleibt. Bei Verlust der Gebrauchsanleitung kann jederzeit eine aktuelle Version unter www.schuchmann.de heruntergeladen werden.

2. Produktbeschreibung.

2.1 Allgemeine Informationen

follow-me momo. ist die clevere Eltern-Kind-Tandemkupplung für Dreiräder und vereint Fahrspaß und Sicherheit. Mit dem **follow-me momo.** ist Ihre ganze Familie jederzeit sicher mit dem Rad unterwegs. Koppeln Sie das Dreirad Ihres Kindes bei Müdigkeit oder unübersichtlichem Straßenverkehr einfach an Ihr eigenes Rad. Die clevere Eltern-Kind-Tandemkupplung lässt Sie schnell auf sich ändernde Situationen reagieren und zwar vollkommen ohne jegliches Werkzeug! Sobald Ihre Einschätzungen es erlauben, fährt der Nachwuchs wieder selbstständig. Das **follow-me momo.** in Größe 1 koppelt Schuchmann-Dreiräder mit 12". Die Größe 2 eignet sich für Dreiräder in 16" und 20". **follow-me momo.** in Größe 3 zieht Dreiräder der Größen 24" und 26".

2.2 Anwendungsbereiche, bestimmungsgemäße Verwendung

follow-me momo. ist für die Benutzung auf geteerten Strassen, Radwegen sowie Feldwegen mit fein geschotterter Oberfläche geeignet. Fahrradfahrer über 16 Jahren dürfen mit dem **follow-me momo.** ein Kind / einen Jugendlichen mitführen, wenn dieses die Pedale sitzend treten kann.



Bitte beachten Sie: Es können lediglich momo Dreiräder (ab 2008) der Firma Schuchmann ohne Elektro-Antrieb angekoppelt werden! Jedoch KEINE momo Therapieräder oder Therapie- und Dreiräder von Fremdherstellern.



2.3 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung / Warnhinweise

- Kontrollieren Sie das **follow-me momo.** vor jeder Fahrt auf gelöste Schrauben, Bruch und Deformationen.
- Prüfen Sie den festen Sitz sämtlicher Schnellspanner, Verschraubungen und Steckverbindungen (Klappstift).
- Prüfen Sie regelmäßig den Luftdruck und Reifenzustand des Zug- und Dreirades.
- Kontrollieren Sie Ihre Felgen immer auf eventuelle Beschädigungen oder bedrohlichen Abrieb durch Felgenbremsen.
- Machen Sie eine Bremsprobe und achten Sie darauf, dass bei allen Felgenbremsen die Bremsbeläge vollständig auf die Felgenflanken ausgerichtet und die Bremsflächen sauber und fettfrei sind.
- Der Bremshebel darf sich nicht zum Lenker durchziehen lassen.
- Die Kombination aus Zug- und Dreirad gilt als eine Einheit, das heißt, die für Fahrräder geltenden Vorschriften, z.B. hinsichtlich Beleuchtung (statten Sie ggf. das Dreirad mit einer batteriebetriebenen Beleuchtung aus) und Reflektoren müssen eingehalten sein.
- Prüfen Sie regelmäßig die Funktion der Lichtenanlage bei Zug- und Dreirad.



2. Produktbeschreibung.

- Prüfen Sie auch beide Räder gemäß der Weisungen des Fahrradherstellers.
- Fahren Sie im Interesse aller bitte stets umsichtig und vermeiden Sie Risiken.
- Wir empfehlen Ihnen deshalb ausdrücklich, nur mit passendem Fahrradschutzhelm nach DIN EN 1078 Fahrrad zu fahren.
- Um mit Ihrem **follow-me momo.** im öffentlichen Straßenverkehr zu fahren, müssen das Zug- sowie das Dreirad den Vorschriften entsprechend ausgerüstet sein. Für den verkehrssicheren Zustand und für eine Ausstattung Ihrer Räder nach den Vorschriften des jeweiligen Landes sind Sie selbst verantwortlich. Bitte lassen Sie sich dazu von Ihrem Fachhändler beraten.
- Mit Ihrem neuen **follow-me momo.** fährt, lenkt oder bremst es sich möglicherweise anders, als Sie es von Ihrem Fahrrad gewohnt sind. Dies gilt besonders dann, wenn das angekoppelte Dreirad zu den größeren Dreirädern zählt und der Anwender entsprechend älter und dadurch auch schwerer ist. Probieren Sie Ihr **follow-me momo.** in Kombination mit dem Dreirad zuerst außerhalb des öffentlichen Verkehrs ohne Anwender aus. Erst wenn Sie sich sicher fühlen, üben Sie gemeinsam mit einem Anwender auf dem Dreirad.
- Das Wichtigste beim Fahren mit dem Gespann sind sichere Bremsen. Das Nachrüsten besserer Bremsen kann Sinn machen. Lassen Sie sich vor Umbauten im Fachhandel beraten und lesen Sie die Anleitung Ihres Fahrrades durch. Führen Sie auf jeden Fall zuerst einige Probebremsungen abseits des Straßenverkehrs durch.
- Benutzen Sie möglichst immer beide Bremsen, um Ihr Gespann zu verzögern. Auf diese Weise wird die Fahrstabilität am besten erhalten und die Gefahr des Bremsenblockierens oder Wegrutschens des Elternfahrrades wird minimiert. Bitte beachten Sie auch, dass bei Nässe die Bremswirkung herabgesetzt ist.
- Bei schneller Kurvenfahrt ist darauf zu achten, dass vorab die Geschwindigkeit gedrosselt wird, da auch ein Dreirad umkippen kann.
- Das max. Zuggewicht (siehe **Punkt 11**) darf nicht überschritten werden.
- Tragen Sie reflektierende Kleidung bei Dunkelheit und ungünstiger Witterung sowie enge Beinbekleidung bei Benutzung eines Fahrrades mit vorderem Mehrfach-Kettenrad.
- Für alle Schäden aus unsachgerechter Benutzung Ihres **follow-me momo.** lehnen wir jede Haftung ab.
- Es dürfen lediglich Dreiräder ohne Elektro-Antrieb der Fa. Schuchmann angekoppelt werden.
- Bei Nutzung des **follow-me momo.** für Schuchmann-Dreiräder mit 12" muss der Lenkungsdämpfer demontiert werden!

2. Produktbeschreibung.

2.4 Fahrverhalten

Wenn mittels **follow-me momo.** ein **momo dreirad.** am Zugfahrrad gekoppelt ist, dann verändert sich das Fahrverhalten. Wir empfehlen daher den Umgang mit dem **follow-me momo.** zunächst außerhalb des öffentlichen Verkehrs ausreichend und erst ohne Anwender auf dem **momo dreirad.** zu üben. Erst wenn Sie sich als Fahrer des Zugfahrrades sicher fühlen, beginnen Sie langsam mit einem Anwender auf dem **momo dreirad.** zu üben um auch für diese Situation ein sicheres Gefühl zu bekommen.

Folgende Dinge sind beim Fahren zu berücksichtigen:

- Vor Fahrtantritt die Funktionstüchtigkeit der Bremsen durch eine Probereisung prüfen.
- Auf nassem, glattem und lockerem Untergrund stets vorsichtig fahren und ruckartiges Treten vermeiden.
- Beim Fahren und speziell beim Abbiegen muss immer auf die Gesamtbreite der Hinterräder des gekoppelten Dreirades geachtet werden. Diese unterscheidet sich deutlich im Vergleich zum Zugfahrrad.
- Bei schneller Kurvenfahrt ist darauf zu achten, dass vorab die Geschwindigkeit gedrosselt wird, da auch ein Dreirad umkippen kann.
- Fahren Sie niemals freihändig.
- Bei Dunkelheit und schlechter Sicht mit Beleuchtung fahren, um die Sichtbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.
- Zur eigenen Sicherheit empfehlen wir dem Fahrer des Zugfahrrades sowie dem Fahrer des Dreirades das Tragen eines Fahrradhelms.
- Vermeiden Sie einen ständigen Betrieb in salzhaltiger Umgebung, da dies Schäden durch Korrosion fördert.
- Der Fahrer des Zugfahrrades sollte beim Bremsen immer beide voneinander unabhängigen Bremssysteme betätigen.




2. Produktbeschreibung

2.5 Ausstattung Grundmodell

- Adapter für Hinterachse des Zugfahrrades
- inkl. Spezial-Achs-Muttern
- Aufhängerriemen

2.6 Produktübersicht

Die untenstehende Abbildung soll Ihnen die Bezeichnung der wichtigsten Bauteile zeigen, sowie die Begriffe, die Sie beim Lesen dieser Gebrauchsanleitung wiederfinden.

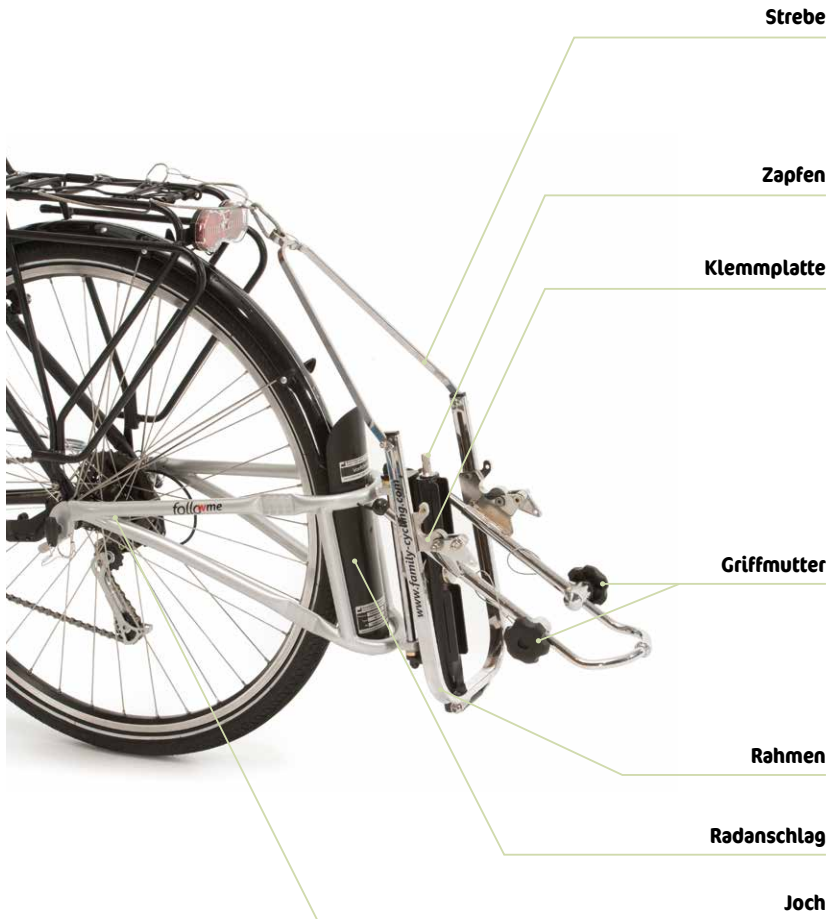

3. Anforderung an das Zugfahrrad.

Sowohl nichtgefederte – als auch gefederte Fahrräder mit Hinterradschwinge sind für die Anwendung des **follow-me momo.** geeignet. Voraussetzung: Der Hinterbau und die Hinterradfelge müssen stabil genug sein, um die typischen Seitenkräfte, wie sie auch bei Einspur- und Fahrradanhänger entstehen, gefahrlos aufzunehmen. Entsteht bei Fahrten mit dem **follow-me momo.** ein „schwammiges“ Fahrgefühl, dann ist Ihr Fahrrad möglicherweise ungeeignet. Im Zweifelsfall gilt: Der Hersteller des Fahrrades legt fest, ob eine Benutzung für das **follow-me momo.** zulässig ist oder nicht. Bevor Sie das **follow-me momo.** montieren, fragen Sie bitte in der Serviceabteilung des Fahrradherstellers nach, ob die Montage erlaubt ist. Lassen Sie sich diese Freigabe gegebenenfalls schriftlich aushändigen.


4. Montage der Eltern-Kind-Tandemkupplung.

Die Montage der Eltern-Kind-Tandemkupplung richtet sich danach, welche Voraussetzungen das Zugfahrrad mit sich bringt:

- Hat Ihr Rad eine Hohlachse mit Schnellspanner, so lesen Sie die **Abschnitte 4.1 und 4.1.1**
- Hat Ihr Rad eine Vollachse mit Radmuttern, so lesen Sie **Abschnitt 4.2**
- Hat Ihr Rad eine Nabenschaltung mit Klick-Box, so lesen Sie **Abschnitt 4.3**

4.1. Wichtige Information zum Umgang mit Schnellspannern

- Öffnen Sie den Schnellspanner. Jetzt sollte der Schriftzug „Open“ lesbar sein.
- Zum Schließen bewegen Sie den Hebel so, dass auf dem Hebel von außen „Close“ zu lesen ist. Zu Beginn der Schließbewegung bis ungefähr zur Hälfte des Hebelweges muss sich der Hebel sehr leicht, d. h. ohne Klemmwirkung, bewegen lassen.
- Während der zweiten Hälfte des Weges muss die Hebelkraft deutlich zunehmen. Zum Schluss lässt sich der Hebel nur schwer oder sogar sehr schwer bewegen. Benutzen Sie den Handballen. In der Endstellung muss der Hebel parallel zum Rad liegen, er darf also nicht seitlich abstehen.
- Wenn sich der Spannhebel im Kreis drehen lässt, ist der sichere Sitz des Laufrades oder des Jochs nicht gewährleistet. Sie müssen ihn wieder öffnen und die Vorspannung mittels Umdrehung erhöhen.
- Wiederholen Sie den Schließvorgang und überprüfen Sie den Sitz erneut. Lässt sich der Spannhebel nicht mehr drehen, klemmt der Spanner richtig.

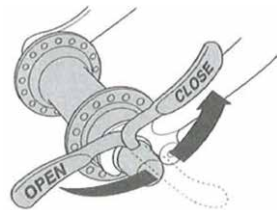





4. Montage der Eltern-Kind-Tandemkupplung.

4.1.1 Schnellspanner am Zugfahrad tauschen

Zuerst müssen Sie den Schnellspanner (A) öffnen und komplett herausnehmen. Dann schrauben Sie den Spezialschnellspanner (B) ein und spannen diesen fest.

Bitte achten Sie auf eine korrekte Montage: Nach dem Festspannen muss der Hebel parallel zur Rahmenstrebe verlaufen (C) und sich stramm umklappen lassen. Schlägt der Hebel am Rahmen an, so ist er nicht ausreichend gespannt und muss nachgespannt werden. Dazu den Hebel lösen, die Mutter auf der anderen Seite leicht anziehen und den Hebel wieder spannen. Danach muss das Laufrad mittig stehen, d.h., dass der Abstand zwischen Felge und Rahmen auf beiden Seiten gleich ist.

Im montierten Zustand müssen im Spannerstück min. 10 - 12mm gewindefrei bleiben (hier wird später die Flügelschraube eingeschraubt). Prüfen Sie dies einfach, indem Sie die Flügelschraube fest einschrauben. Ist das Gewinde nach Erreichen des Anzugmomentes noch sichtbar, muss die Gewindestange entsprechend gekürzt werden. Falls Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler (siehe **Punkt 13.3**).

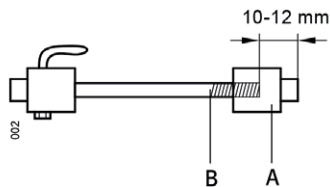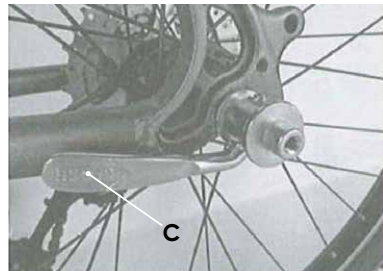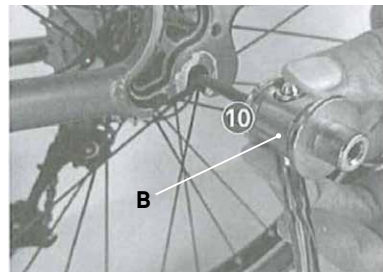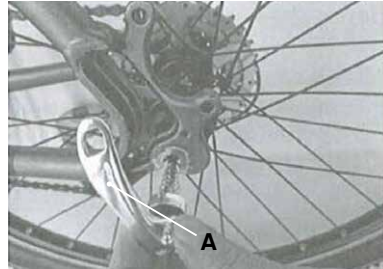



Sitzt der Schnellspannhebel (A) nicht einwandfrei, kann sich das Laufrad lösen. Prüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der Schnellspanner, am besten vor jeder Fahrt!



4. Montage der Eltern-Kind-Tandemkupplung.

4.2 Vollachsadapter montieren (bei Fahrrädern mit Radmuttern)

Anfangs müssen Sie die Radmuttern (A) lösen und entfernen. Belassen Sie die Beilag-, bzw. Unterlagscheibe auf der Achse und schrauben den Vollachsadapter (B) an, dabei das Konstrukt gut festziehen (die Drehmomentangabe des Fahrradherstellers einhalten). Danach muss das Laufrad mittig stehen. Das heißt, dass der Abstand zwischen Felge und Rahmen auf beiden Seiten gleich ist. Die Vollachsadapter übernehmen auch die Funktion der Radmuttern. Prüfen Sie daher regelmäßig den festen Sitz der Vollachsadapter, am besten vor jeder Fahrt.

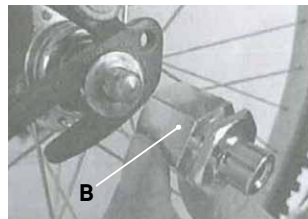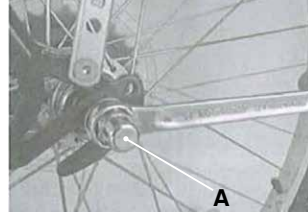

Sitzen die Vollachsadapter nicht einwandfrei, kann sich das Laufrad lösen. Prüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der Vollachsadapter, am besten vor jeder Fahrt.

4.3 Adapter für Nabenschaltung (für Fahrräder mit Klick-Box oder mit Schaltzug durch Achse)

Besitzt Ihr Rad diesen Schaltungstyp, so benötigen Sie den Vollachsadapter. Beispiel für eine Nabenschaltung mit Klick-Box System (C).




Beispiel für eine Nabenschaltung (D), bei der der Schaltzug durch die Achse geführt wird.




4. Montage der Eltern-Kind-Tandemkupplung.

4.3.1 Montage Nabenschaltadapter


Demontieren Sie bitte zunächst die Klickbox (A) oder entsprechenden Schaltzug von der Achse und lösen die Radmutter (B).

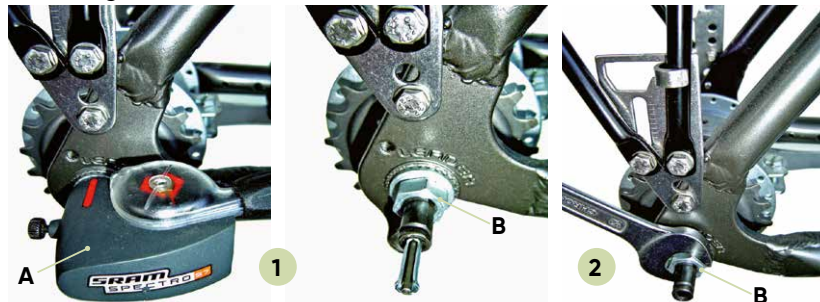

Halten Sie anschließend den U-Rohrbügel (C) zwischen Rad und Gepäckträger. Führen Sie jetzt das Unterteilrohr (D) ins das U-Rohr (C), schieben das Flachprofil mit Loch (E) auf die Achse und ziehen die Radmutter wieder fest.

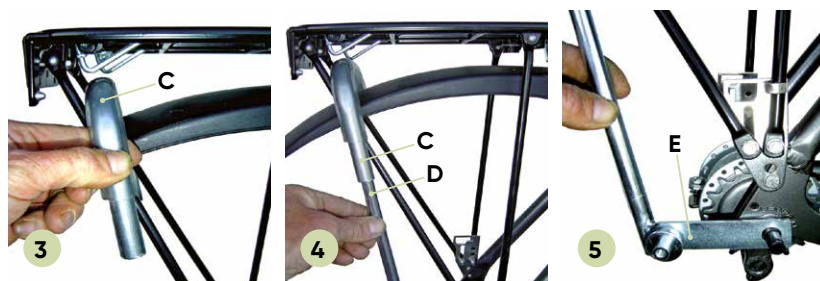

Fixieren Sie nun das U-Rohr (C) an der Gepäckträgerstrebe (F) mit einem Kabelbinder (G). Führen Sie anschließend die Schritte 2 bis 6 auch auf der linken Seite durch. Montieren Sie abschließend wieder die Klickbox (A).

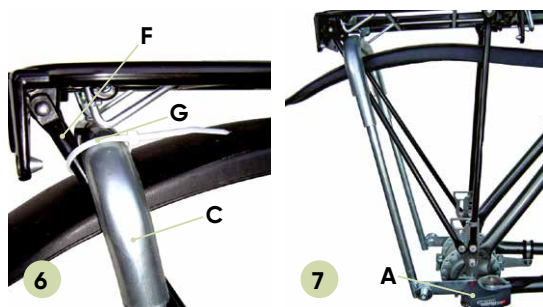


! Sitzen die Nabenschaltadapter nicht einwandfrei, kann sich das Laufrad lösen. Prüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der Nabenschaltadapter, am besten vor jeder Fahrt.


4. Montage der Eltern-Kind-Tandemkupplung.

4.4 Montage Steckachsadapter

Lösen Sie bitte zunächst die vorhandene Steckachse (A) und ziehen diese heraus.

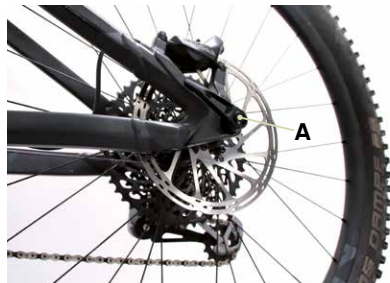

Nehmen Sie nun bitte den Steckachsadapter (B), lösen die Schraube (C) und schieben den Steckachsadapter (B) in die Öffnung am Rahmen.

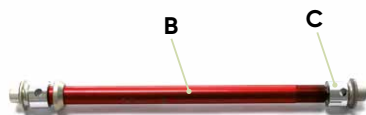

Schrauben Sie jetzt bitte den Steckachsadapter (B) fest, z.B. mit Hilfe eines Inbusschlüssels (D). Montieren Sie abschließend auf der anderen Seite des Steckachsadapter (B) die zuvor gelöste Schraube (C) und ziehen auch diese fest.






Sitzt der Steckachsadapter nicht einwandfrei, kann sich das Laufrad lösen. Prüfen Sie regelmäßig den festen Sitz des Steckachsadapters, am besten vor jeder Fahrt.



4. Montage der Eltern-Kind-Tandemkupplung.

4.5 follow-me momo. montieren

Hängen Sie die Strebe (A) am Zapfen (B) ein und sichern sie mit dem Sicherungsstift (C). Vergewissern Sie sich, dass der Sicherungsstift (D) ganz geschlossen hat. Falls nicht, wenden Sie den Splint um 180° und schließen Sie den Federring erneut. Hängen Sie das **follow-me momo.** beidseitig in die Mutterköpfe bzw. in den Vollachsadapter ein. Beide Seiten müssen dabei in den Mutterkopf einschnappen. Schrauben Sie die Flügelschrauben (E) in den Mutterkopf ein und ziehen Sie sie von Hand stramm an. Die Kupplung des **follow-me momo.** bleibt trotzdem drehbar. Setzen Sie den Sicherungssplint (F) ein: Er wird zwischen die Kupplung des **follow-me momo.** und den Spezialschnellspanner gesteckt. Dazu das gerade Ende des Sicherungssplints (F) in das Loch auf der Innenseite der Kupplung des **follow-me momo.** stecken und soweit durchschieben bis er vollständig in der Nut des Spezialschnellspanners eingerastet ist.

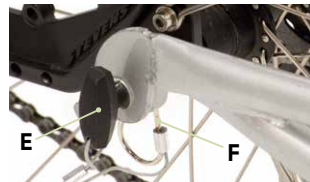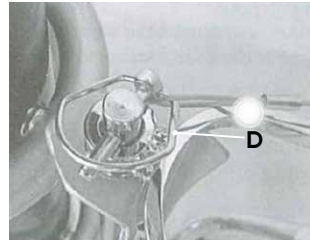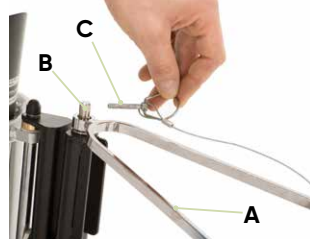


Montieren Sie immer beide Sicherungselemente – Flügelschrauben und Sicherungssplints! Ist

eines dieser Elemente nicht entsprechend der Anleitung montiert, könnte sich die Kupplung vom Fahrrad lösen. Prüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der Flügelschrauben und Sicherungssplints, am besten vor jeder Fahrt.



Hängen Sie anschließend die Strebe am Zapfen aus und hängen Sie entweder mit dem Aufhängerriemen (G) am Sattel oder am Gepäckträger (H) hoch. Alternativ kann ein optionaler Aufhängebügel (I) verwendet werden (siehe **Punkt 8**). Dieser wird am Gepäckträger befestigt. So hängt das **follow-me momo.** sicher am Elternrad, wenn es nicht gebraucht wird.

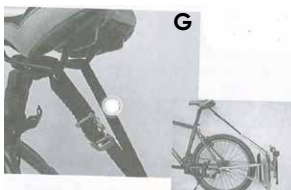




5. Vorbereitung des momo dreirad.

5.1 Achsverlängerung montieren

Lösen und entfernen Sie die Radmuttern (A), lassen Sie dabei die Beilag-, bzw. Unterlegscheibe auf der Achse und schrauben Sie die Achsverlängerungen (B) an.

Achten Sie darauf, dass die Ausfallsicherung in die vorgesehene Öffnung greift und anschließend gut festgezogen wird (Drehmomentangabe des Fahrradherstellers einhalten).

Danach muss das Laufrad mittig stehen. Das heißt, dass der Abstand zwischen Felge und Gabelrohr auf beiden Seiten gleich ist. Die Achsverlängerungen (B) übernehmen auch die Funktion der Radmuttern (A). Prüfen sie daher regelmäßig den festen Sitz der Achsverlängerungen (B), am besten vor jeder Fahrt.

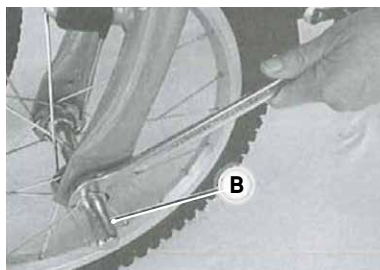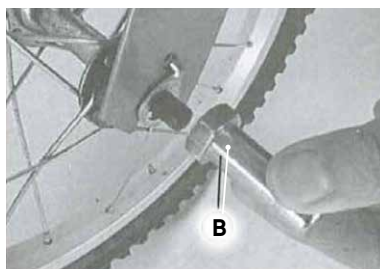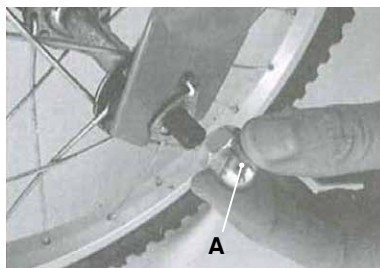

5.2 Aufnahmeschelle am Dreirad-Unterrohr befestigen

Die Schelle (C) müssen Sie am Unterrohr oberhalb der Treteinheit des Dreirades anbringen. Ziehen Sie die Aufnahmeschelle (C) noch nicht fest. Dies geschieht erst, nachdem Sie die Klemmplatte auf die Größe des Dreirades eingestellt haben (siehe Punkt 6.1).



6. follow-me momo. einrichten (auf Raddurchmesser des Dreirades)

Das **follow-me momo.** muss vor Benutzung eingerichtet werden, damit eine sichere Verwendung gewährleistet ist. Bitte beachten Sie in Zuge dessen die folgenden Hinweise.




6.1 Klemmplatte auf Dreiradgröße einstellen

Hier sehen Sie die Ausgangslage: Das **follow-me momo.** ist hochgehängt am optionalen Aufhängebügel (A).

Als erstes müssen Sie die Strebe (B) am Karabinerhaken (C) des Aufhängebügels (A) lösen. Klappen Sie anschließend die Strebe (B) auf und hängen diese in den Zapfen (D) ein.

Nun den Sicherungsstift (E) seitlich aus der Klemmplatte (F) herausziehen und damit die Strebe am Zapfen (D) sichern. Vergewissern Sie sich, dass der Federring ganz schließt. Falls nicht, wenden Sie den Splint um 180° und schließen Sie den Federring erneut. Danach den Teleskopbügel (G) nach unten klappen und die beiden Griffmutter (H) lösen.

Das Vorderrad des Dreirades bis an den Radanschlag (I) schieben, Zugrad und Dreirad bleiben dabei am Boden! Das Vorderrad berührt nun das **follow-me momo.** am Radanschlag (I) und mit der Achsverlängerung (J) die Stellschiene (K). Setzen Sie an dieser Stelle an der Stellschiene (K) eine Markierung (z.B. mit einem wasserfesten Filzstift).

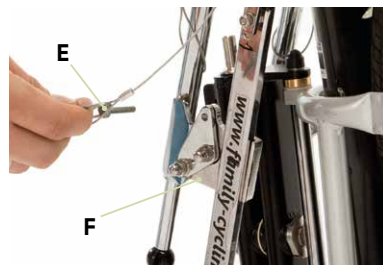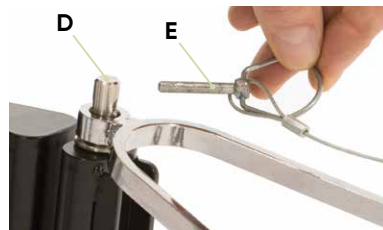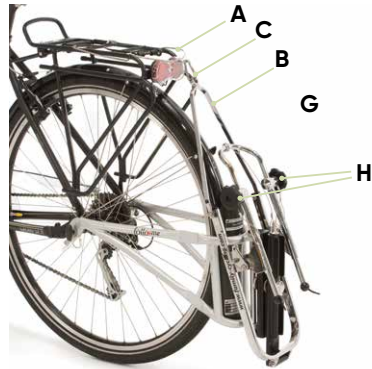

6. follow-me momo. einrichten (auf Raddurchmesser des Dreirades)

Lösen Sie beidseitig die zwei Sechskantschrauben (A) der Klemmplatte. Schieben Sie die Klemmplatte (B) bis zu der Markierung (C), die Sie sich vorher gesetzt haben. Das Lochzentrum in der Klemmplatte (B) muss auf Höhe der Markierung positioniert werden. Anschließend die Klemmplatte (B) wieder festziehen und beidseitig parallel einstellen. Am genauesten geht das durch Ausmessen am Rahmen des **follow-me momo**.



Rollen Sie das Rad erneut hinein; dieses Mal legen Sie die Achsverlängerung (D) in die Öffnung der Klemmplatte (B).

6.2 Position der Aufnahmeschelle einstellen

Zuerst müssen Sie die Griffmutter (E) an beiden Seiten lösen, den Teleskopbügel (F) anheben und in die Aufnahmeschelle (G) am Dreirad- Unterrohr einhängen.



Die optimale Einstellung ist, wenn das Vorderrad ca. 6 - 8 cm (Schuhhöhe) vom Boden entfernt ist. Falls dieser Fall nicht eintritt, verschieben Sie die Aufnahmeschelle (G) am Unterrohr entsprechend.

Anschließend die Spannschrauben (H) der Aufnahmeschelle (G) festziehen. Anschließend die Griffmutter (E) wieder festdrehen.



7. An- und Abkoppeln unterwegs.

Das **follow-me momo.** ermöglicht es dem Benutzer, das **momo dreirad.** unterwegs an- und abzukoppeln, falls der Verkehr undurchsichtig wird oder das Kind ermüdet. Bei Erholung des Kindes oder beruhigter Verkehrslage, kann das Dreirad problemlos wieder vom Erwachsenenrad abgekoppelt werden.

In der Ausgangslage ist das **follow-me momo.** mittels Aufhängerriemen oder Aufhängebügel hochgehängt. Um es anzukoppeln, müssen Sie die Strebe (A) am Karabinerhaken des Aufhängeriemens oder Aufhängebügels lösen. Anschließend ggf. den losen Aufhängeriemens um das Sattelrohr schlingen und den Karabinerhaken am Sattelgestänge einhängen. Dann die Strebe aufklappen und in den Zapfen (B) einhängen. Ziehen Sie den Sicherungsstift (C) seitlich aus der Klemmplatte heraus und sichern damit die Strebe (A). Vergewissern Sie sich, dass der Federring ganz schließt. Falls nicht, wenden Sie den Splint um 180° und schließen Sie den Federring erneut. Klappen Sie den Teleskopbügel (D) nach unten und lösen Sie die beiden Griffmutter (E). Nun das Dreirad einführen, dabei das **follow-me momo.** mit einer Hand anheben – das Dreirad bleibt immer am Boden. Wenn die Achsverlängerungen (F) in die Klemmplatte (G) geführt sind, Teleskopbügel (D) hochziehen und an der Aufnahmeschelle (H) einhängen. Dann die Griffmutter (E) beidseitig anziehen. Abgekoppelt wird einfach in umgekehrter Reihenfolge.




8. Aufhängebügel für Gepäckträger mit „Top-Light“ (optional).


Führen Sie den Aufhängebügel gemäß Abbildung A und B ein.



Drehen sie die Enden des Aufhängebügels um den Gepäckträgerrand (C) und stecken die Enden oben ein (D).

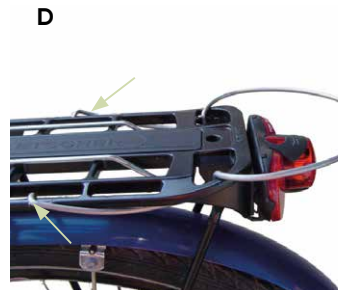

Zusätzlich können Sie den Aufnahmebügel mit einem Kabelbinder sichern (E). Jetzt kann am Aufnahmebügel das **follow-me momo.** mittels Karabinerhaken aufgehängt werden (F).

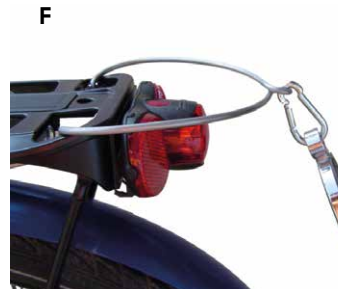

9. Hinweise zur Nutzung des follow-me momo. in Größe 3.

Lieferumfang

Mit dem **follow-me momo.** Gr. 3 sind folgende zusätzliche Teile mitgeliefert:


1x Aufhängebügel „Top-Light“
inkl. Karabinerhaken



2x Halteseil mit Ring und Öse (A)



2x Gurtband (B)

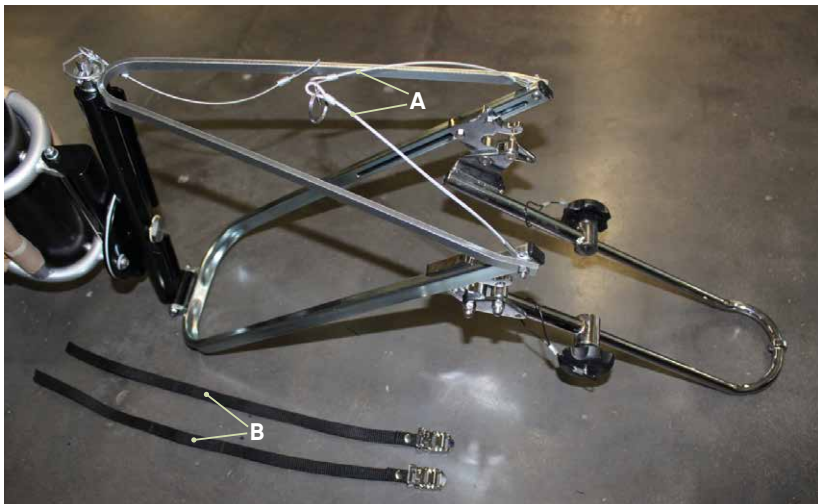


9. Hinweise zur Nutzung des follow-me momo. in Größe 3.

9.1 Einrichten des follow-me momo. in Größe 3

Nachdem Sie das **follow-me momo.** auf den Raddurchmesser des Dreirades eingestellt haben, müssen Sie noch die zwei Halteseile mit Ring und Öse (**A**), die am Rahmen des **follow-me momo.** montiert sind, sichern. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

Fädeln Sie die mitgelieferten Gurtbänder (**B**) durch die Ringe der Halteseile (**C**) und durch den Sicherungsstift (**D**) an der Strebe.

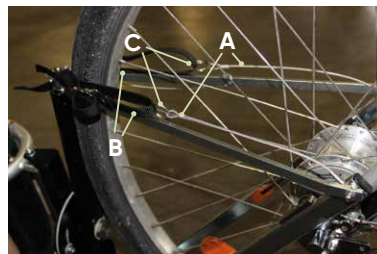

9. Hinweise zur Nutzung des follow-me momo. in Größe 3.


9.2 Fahren ohne Dreirad mit dem follow-me momo. in Größe 3



Der Aufhängebügel mit Karabinerhaken muss für die Ausführung der nächsten Schritte bereits montiert sein (siehe Punkt 8).


Koppeln Sie bitte wie vorher beschrieben das Dreirad ab (siehe **Punkt 7**).

Nun nehmen Sie den Karabinerhaken (**A**) des Aufhängebügels (**B**) ab und setzen beide Ringe der Halteseile (**C**) ein. Danach Karabinerhaken (**A**) zusammen mit den Ringen (**C**) am Aufhängebügel (**B**) anhängen.

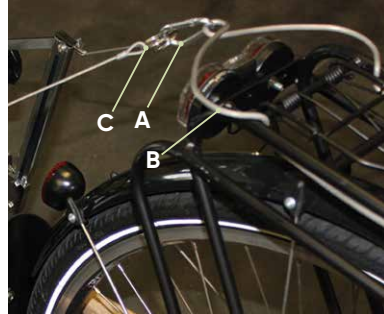

9.2.1 Sicherung des follow-me momo. gegen Verdrehen

Legen Sie die Gurtbänder (**D**) um das Joch (**E**) und den **follow-me momo.**-Rahmen (**F**) und schnüren ihn fest. Dieser Schritt muss auf beiden Seiten durchgeführt werden.

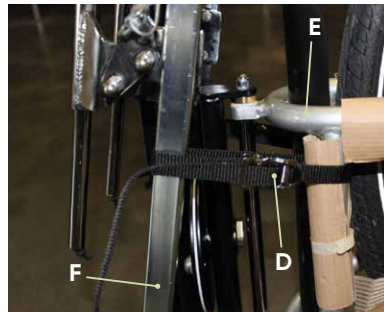

10. Reinigen und Instandhalten.

10.1 Pflege

Um die Funktionssicherheit und die Optik des Produktes zu erhalten muss es regelmäßig gepflegt werden, dabei sind folgende Hinweise zu beachten:

- Schmutz niemals trocknen lassen, sondern immer mit Wasser und einem weichen Tuch oder Schwamm entfernen. Zum Waschen keinen Hochdruckreiniger verwenden.
- Aggressive Reinigungssätze dürfen nicht verwendet werden. Verwenden Sie eine milde Seifenlösung als Reinigungsmittel.
- Lagern Sie das Fahrrad mit dem **follow-me momo.**, insbesondere im Winter, in einem trockenen, konstant temperierten Raum.

10.2 Instandhaltung

Bitte führen Sie eine tägliche Sichtprüfung durch und kontrollieren regelmäßig die Eltern-Kind-Tandemkupplung auf Risse, Brüche, fehlende Teile und Fehlfunktionen. Bitte wenden Sie sich bei einem Defekt oder einer Fehlfunktion direkt an den ausliefernden Fachhändler (siehe **Punkt 13.3**).

10.3 Ersatzteile

Für eine Ersatzteilbestellung wenden Sie sich bitte an den ausliefernden Fachhändler (siehe **Punkt 13.3**).

11. Technische Daten.

Maße

	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
erforderliche Größe des Zugfahrrades	26" - 28"	26" - 28"	26" - 28"
max. Dreiradgröße	12" (auch für 16" + 20" zu verwenden)	16" + 20"	24" + 26"
max. Zuggewicht	40 kg	60 kg	80 kg
Gewicht	5,1 kg	5,1 kg	8,7 kg
Art.-Nr.	39 00 100	39 01 100	39 02 100



12. Gewährleistung.

Bei allen Produkten gilt die zweijährige gesetzliche Gewährleistungsfrist. Diese beginnt mit der Ablieferung bzw. der Übergabe der Ware. Tritt innerhalb dieser Zeitspanne an der von uns gelieferten Ware nachweislich ein Werkstoff- oder Fabrikationsfehler auf, werden wir bei frachtfreier Rücksendung an uns, den angezeigten Schaden sichten und gegebenenfalls kostenlos und nach unserer Wahl nachbessern oder neu liefern.

13. Identifizierung.

13.1 Produktversion

Die Tandemkupplung **follow-me momo.** ist in drei Größen erhältlich und kann durch Zubehör (siehe **Punkt 8**) ergänzt werden.

13.2 Ausgabe des Dokuments

Gebrauchsanleitung **follow-me momo.** - Änderungsstand I; Ausgabe 07.2021

13.3 Name und Adresse des Herstellers, ausliefernder Fachhändler

Dieses Produkt wurde hergestellt von:



Schuchmann GmbH & Co. KG

Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf

Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109

info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

Dieses Produkt wurde von folgendem Fachhändler ausgeliefert: