

# Gebrauchsanweisung

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig, bevor Sie die Therapiehilfe benutzen.

## Therapiehilfe

- Therapiepolster U-Form



**Sehr geehrte Eltern,**

wir danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und den Erwerb dieses therapeutischen Hilfsmittels. Dank der hochwertigen und äußerst stabilen Bauweise ist das Produkt für eine langfristige Nutzung ausgelegt.

Die Anpassung sowie die Erstinbetriebnahme sollten durch einen autorisierten Fachhändler oder entsprechend geschultes Fachpersonal erfolgen. Dieser weist Sie vor der ersten Anwendung in die sachgerechte Handhabung ein, sodass ein sicherer Umgang gewährleistet ist und Sie den therapeutischen Nutzen des Produktes optimal ausschöpfen können.

### **Wichtige Information!**

Stellen Sie sicher, dass diese Gebrauchsanweisung bei dem Produkt verbleibt.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Team jederzeit gerne unter (06721) 906 0 oder mit einem Videoanruf zur Verfügung. Wir freuen uns über jede Anregung Ihrerseits zur Verbesserung dieses Produkts per Mail an [info@rehanorm.de](mailto:info@rehanorm.de).

**Viel Freude bei der Anwendung!**

Ihre

Andrea Staus und das RehaNorm-Team

## **Konformitätserklärung**



Produktbezeichnung: Therapiepolster U-Form

Produktkennzeichnung: BRTHE/4200

### **Erklärung:**

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Patienten oder Anwender bestimmt, für den die Person, die das betreffende Produkt verordnet hat und die aufgrund ihrer beruflichen Qualifikation durch nationale Rechtsvorschriften dazu befugt ist, die Verordnung ausgestellt hat.

Die betreffenden Informationen zu Patient oder Anwender bzw. zum Verordner sind bei uns als Hersteller des Produktes einsehbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen des Anhangs I der Verordnung (EU) 2017/745 des europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017.

### **Hersteller:**

RehaNorm GmbH & Co. KG,  
Am Ockenheimer Graben 50,  
55411 Bingen  
Deutschland

Telefon +49 6721 906 0  
Telefax +496721 906 66,  
E-Mail: [info@rehanorm.de](mailto:info@rehanorm.de),  
[www.rehanorm.de](http://www.rehanorm.de)

## Inhaltsverzeichnis

Konformitätserklärung .....	2
Inhaltsverzeichnis.....	3
Zweckbestimmung / Indikationen .....	3
Produktbeschreibung.....	4
Anwendungsmöglichkeiten.....	4
Warn- und Sicherheitshinweise .....	4
Reinigung und Pflege .....	5
Produktlebensdauer .....	5
Entsorgung .....	5
Gewährleistung.....	6

## Zweckbestimmung / Indikationen

### **Zweckbestimmung:**

Das Therapiepolster in U-Form dient der Unterstützung des Haltungs- und Gleichgewichtstrainings. Es kann vielseitig eingesetzt werden, z. B. als Sitz-, Reit- oder Kniehilfe, und unterstützt unterschiedliche therapeutische Übungen.

Das Produkt ist für den Einsatz in Therapie, Rehabilitation und Frühförderung vorgesehen.

### **Indikationen:**

- Förderung von Gleichgewicht und Körperwahrnehmung
- Unterstützung der Rumpfstabilität
- Training verschiedener Sitz- und Stützpositionen

### **Kontraindikationen**


Es sind keine Kontraindikationen bekannt. Die Anwendung erfolgt nach therapeutischer Einschätzung.

## Produktbeschreibung

Das Therapiepolster besteht aus stabilem Hartschaum mit einem strapazierfähigen, bunten Kunstlederbezug. Die U-Form bietet seitliche Begrenzung und Halt. Je nach Ausführung beträgt die Sitzhöhe ca. 24 cm und die Länge ca. 60 cm.

Das Therapiepolster ist sowohl in Standardmaßen als auch nach individuellen Maßen erhältlich und kann somit gezielt an unterschiedliche therapeutische Anforderungen angepasst werden.

Maximale Belastung 20 kg.

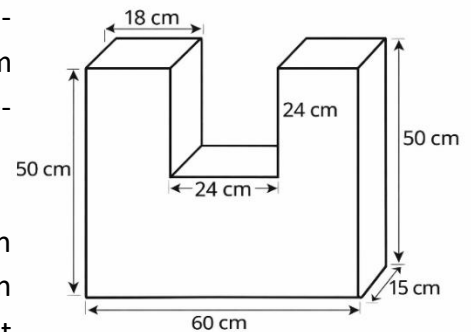

## Anwendungsmöglichkeiten

- Sitzhilfe: Das Kind sitzt im U-förmigen Polster mit seitlicher Führung.
- Reithilfe: Das Polster wird rittlings genutzt, z. B. zur Förderung der Hüftöffnung.
- Kniehilfe: Unterstützung bei knienden oder halb knienden Positionen.

Die Auswahl der Anwendung erfolgt je nach therapeutischem Ziel und den individuellen Fähigkeiten des Nutzers.

**Hinweis:** Bei Unsicherheiten zur Anwendung oder bei auftretenden Problemen wenden Sie sich bitte an eine Therapeutin, einen Therapeuten oder den Hersteller.

## Warn- und Sicherheitshinweise



- Das Produkt darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Kinder dürfen während der Nutzung nicht unbeaufsichtigt bleiben.
- Die Anwendung darf ausschließlich auf ebenem, rutschfestem Untergrund erfolgen.
- Das Produkt ist kein Spielzeug.
- Vor jeder Anwendung ist das Produkt auf Beschädigungen zu überprüfen.
- Bei sichtbaren Beschädigungen oder Funktionsbeeinträchtigungen darf das Produkt nicht weiter verwendet werden.
- Eigenmächtige Veränderungen oder Reparaturen sind nicht zulässig.
- Die Anwendung erfolgt nur nach therapeutischer Einschätzung bzw. nach Einweisung durch Fachpersonal.
- Maximale Belastung von 20 kg darf nicht überschritten werden.

## Reinigung und Pflege

Der Bezug des Therapiepolsters besteht aus hochwertigem Kunstleder.

- Um den Bezug zu reinigen, benutzen Sie einen Schwamm, maximal 30 Grad warmes Wasser und eine milde Seife.
- Benutzen Sie keine Waschmaschine, keinen Wäschetrockner und kein Bügeleisen.
- Benutzen Sie keinen Weichspüler
- Kunstleder ist für chemischen Reinigung nicht geeignet
- Verwenden Sie keinerlei Reinigungsmittel, die Öle und Fette enthalten.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung und starken Hitzequellen schützen.
- Sind Körpersekrete in den Bezug eingedrungen, desinfizieren Sie diese Stellen großflächig mit einem haushaltsüblichen Desinfektionsmittel.

Zur Desinfektion können z.B. folgende Mittel verwendet werden:

Hexaquant S (1,5% bis 5%)

Melsept SF (0,5% bis 5%)

Meliseptol unverdünnt

Die aufgeführten Hinweise befreien den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht im Umgang mit den Materialien und Reinigungsmitteln.

## Produktlebensdauer

Die vorgesehene Produktlebensdauer beträgt 5 Jahre bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sowie sachgerechter Reinigung und Pflege.

Die tatsächliche Nutzungsdauer kann je nach Intensität der Nutzung, Lagerung und Pflege variieren. Bei sichtbaren Beschädigungen oder Funktionsbeeinträchtigungen darf das Produkt nicht weiter verwendet werden.

## Entsorgung

Das Produkt kann gemäß den geltenden nationalen Vorschriften über den Haus- oder Sperrmüll entsorgt werden. Bitte beachten Sie lokale Entsorgungsrichtlinien.

# Gewährleistung

## Gewährleistungsdauer

Die Gewährleistung für dieses Produkt beträgt **24 Monate ab dem Kauf**. Bitte bewahren Sie die Verkaufsunterlagen mit Datum auf.

Um Ihre Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, setzen Sie sich mit ihrem Fachhändler in Verbindung, der alle weiteren notwendigen Maßnahmen für Sie einleiten wird.

## Einschränkungen der Gewährleistung

Diese Gewährleistung beinhaltet nicht Schäden, die durch Nachlässigkeit, fehlerhaften und unsachgemäßen Gebrauch oder durch Nutzung nicht originaler Teile entstanden sind oder durch falsche Behandlung, weil diese Gebrauchsanweisung nicht beachtet worden ist. Ausgeschlossen sind auch Schäden, die durch einen Unfall entstanden sind.

Ein Gewährleistungsanspruch entfällt auch dann, wenn im Formular für die Gewährleistung der Name und der Stempel des Fachhändlers, von dem Sie die Therapiehilfe erhalten haben, nicht vorhanden ist oder falls Sie das Formular für die Gewährleistung nicht vorlegen können.

## Formular für Gewährleistungsansprüche

Produkt Modell Nummer:	<b>Therapiepolster U-Form</b>
Name, Vorname:	
Straße und Hausnummer:	
Stadt:	
PLZ:	
Telefonnummer:	
E-Mail:	
Kaufdatum:	
Fachhändler:	

Version: Rev. 01  
Sprache: Deutsch  
Stand: 01/2026