

FreiStil Tischlerei
GmbH & Co. KG

Ruppenkampstraße 16

49084 Osnabrück

Fon 0541 – 800 3969 0
Fax 0541 – 800 3969 99
E-mail info@freistil.com
Internet www.freistil.com

Betriebsanleitung

Therapie – Kinderbett

„Lea“


(Standard und Vario)



Vor Inbetriebnahme aufmerksam durchlesen!

Die Bedienungsanleitung ist jedem Anwender zur Verfügung zu stellen!

INHALTSVERZEICHNIS

1. Montageanleitung (nur für den autorisierten Fachhandel)		Seite
1.1	Montage Bettkasten	03
1.2	Montage Bettköpfe	03
1.3	Montage Seitengitter	03
1.4	Hubschere positionieren, Liegefläche montieren, Eingreifschutz befestigen.	04/05
1.5	Transportrollen	05
1.6	OPTIONAL: Verstellung der Liegefläche elektromotorisch.	06
1.7	OPTIONAL: Antitrendelenburg – Lagerung	06
1.8	OPTIONAL: Abnehmbare Bettpfosten	06
 2. Bedienungsanleitung		
2.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	07
2.1.1	Indikation	07
2.1.2	Kontraindikation	07
	2.2 Wichtige Hinweise zur Betriebssicherheit	07
	2.3 Warnhinweise	08
	2.4 Hubeinheit	09
	2.5 Liegefläche	09
	2.6 Handschalter	10
	2.7 Seitengitter	11
	2.8 Transportrollen	11
	2.9 Patientenlifter	11
	2.10 Reinigung, Desinfektion und Wartung	11
	2.11 Nutzungsdauer	12
	2.12 Wiedereinsatz (Ersatzteillisten)	12
	2.13 Zubehör	12
	2.14 Symbolerklärung	12
 3. Technische Daten		
3.1	Bettkasten	13
3.2	Hubeinheit	13
3.3	Liegefläche	13
3.4	Motoren	13
 4. Anhang (nur für den autorisierten Fachhandel)		
4.1	Allgemeine Hinweise	14
4.2	Anleitung Wartung	14/15
4.3	Vordruck für Protokoll: Wartung / Sicherheitstechnische Kontrolle nach § 6 MPBetreibV	16

1. MONTAGEANLEITUNG

Die Montage ist ausschließlich durch geschultes Fachpersonal durchzuführen. Wir empfehlen die Montage zu zweit nach den folgenden Punkten:

- 1.1 An der Bettinnenseite befinden sich Aufkleber mit nummerierten Pfeilen von 1 bis 4 (Bild 1).**
 Entsprechend dieser Nummerierung die Bettseiten und die Kopf- und Fußteile zuordnen.



Bild 1

Die Bettseiten werden entsprechend der Nummerierung in die Kopf- und Fußteile eingehängt (Bild 2)

Bettseiten bis zum Anschlag in die Bettbeschläge drücken und auf festen Sitz achten.

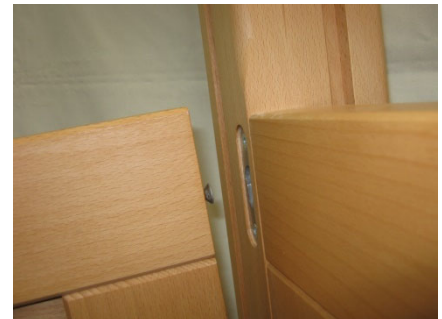


Bild 2

- 1.2 Die Bettköpfe sind abnehmbar.**

Nach dem Einhängen der Seitenteile die Bettköpfe festschrauben (M6x50mm).



Bild 3

- 1.3 Seitengitter** von oben gleichmäßig in die Nuten der Bettpfosten einführen (Bild 4).
 Seitengitter durch gleichzeitiges Betätigen der beiden Verriegelungsmechanismen in die unterste Position führen (Bild 5).



Bild 4

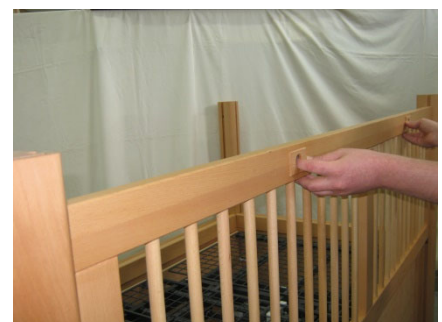


Bild 5

- 1.4** An der Schere befindet sich der Aufkleber „Kopfseite“.
 Die Hubschere, entsprechend dem Aufkleber „Kopfseite“ im
 Bettkasten, positionieren.
 Die Schere der Hubeinheit anhand der Markierungen
 in den Bettkasten legen und festschrauben (Bild 6).

Lea Vario M6x15mm

Lea 6x35mm

Hubschere in die oberste Position fahren (Bild 7).

Liegefläche der Hubeinheit auf die
 Hubschere auflegen (Bild 8).

Liegefläche auf die Höhe des Bettkastens herunterfahren.

Liegefläche ausrichten (Bild 9).



Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9

Liegefläche mit den beiliegenden Schrauben (4x35mm)
 festschrauben (Bild 10).

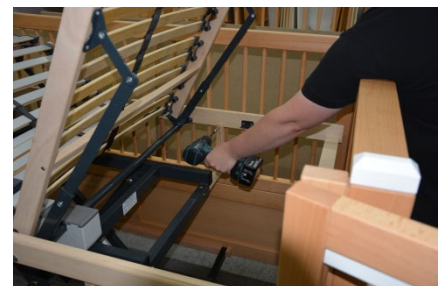


Bild 10

Kabel der Motoren (**nur bei elektromotorischer Kopfteil- bzw. Kopf- u. Fußteilverstellung - siehe Pkt. 1.6**) mit der Steuerung verbinden.

Die Steuerung befindet sich am Motor der Hubschere.

Achten Sie bei der Kabelführung darauf, dass es zu keinen Quetschungen und Beschädigungen des Kabels kommen kann!!!

Eingreifschutz (Bild 11 + 12), mit den beiliegenden Flachkopfschrauben montieren (M6x25 und 4x22mm).

Eingreifschutz besteht aus 2 x 2 Paaren, Paar 1 an den Längsseiten de Liegefläche,

Paar 2 an den Querseiten von Kopf- und Fußteil befestigen.



Bild 11

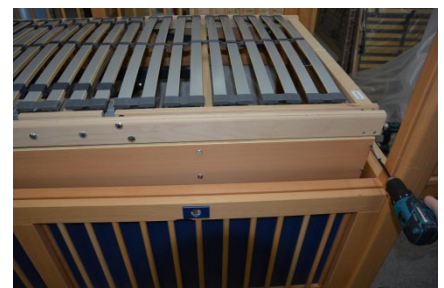


Bild 12

1.5 Transportrollen

App.-Lenkrolle, 75 x 30mm, Doppelstopp im Nachlauf.
Zur Verriegelung den Fußhebel nach unten drücken, lösen durch Hochziehen des Fußhebels (Bild 13).

Nach jedem Verschieben des Bettes müssen alle Räder ordnungsgemäß verriegelt werden!

OPTIONAL: Zubehör
App.-Lenkrolle, 100 x 30mm.



Bild 13

1.6 OPTIONAL:

Zubehör

Kopf- u. Fußteil komplett elektromotorisch.

Vormontierten Doppelmotor mit der Steuerung verbinden
Bitte die Zugentlastung nutzen (Bild 14).

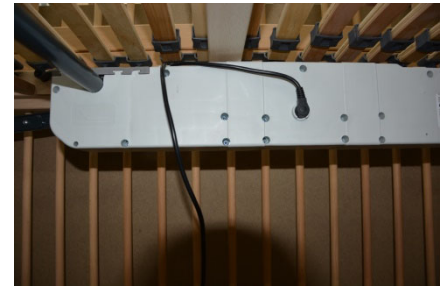


Bild 14

Achten Sie bei der Kabelführung darauf, dass es zu keinen Quetschungen und Beschädigungen des Kabels kommen kann!!!

1.7 OPTIONAL:

Zubehör

Antitrendelenburg-Lagerung

Bei der Antitrendelenburg-Lagerung gibt es einen
2. Handschalter + eine 2. Steuerung (Bild 15).



Vorsicht beim Senken des Kopfteiles,
Quetschgefahr am unteren Querholz.

Nach dem Einhängen der Bettseiten müssen die
mitgelieferten „Leisten“ (Bild 16) zwischen
Bettseite und Pfosten befestigt werden.



Bild 15

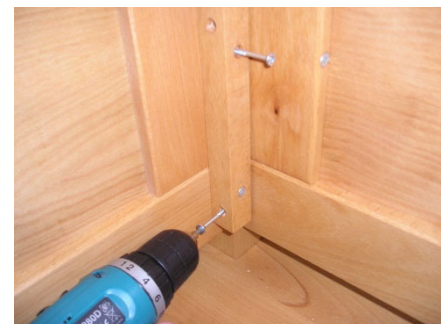


Bild 16

1.8 OPTIONAL:

Zubehör

Abnehmbare Bettpfosten

LÖSEN Sterngriffe lösen (Bild 17), Pfosten abnehmen.

BEFESTIGEN Abnehmbaren Pfosten aufsetzen, Sterngriff festziehen, **festen Sitz kontrollieren!**
(Bild 18)



Bild 17

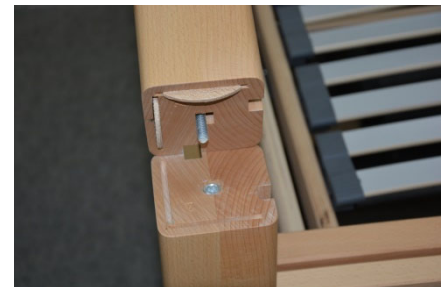


Bild 18



FreiStil Tischlerei, Ruppenkampstraße 16, D - 49084 Osnabrück
Fon 0541-800 3969 0, Fax 0541-800 3969 99, info@freistil.com

2. BEDIENUNGSANLEITUNG

2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Therapie-Kinderbett „LEA“ ist für den Einsatz in der häuslichen Pflege konzipiert. Anwendungsbereich 3 + 4 gemäß DIN EN 60601-2-52. Die im medizinischen Sinn zu erbringende Leistung besteht in der Diagnostik, Behandlung und Überwachung von Krankheiten unter medizinischer Aufsicht. Es ist nur für eine Person:

- **Größe:** min. 75cm – max. Liegefläche minus 15cm / **Gewicht:** max. 135 kg - zugelassen und die sichere Arbeitslast (siehe Typenschild) darf nicht überschritten werden. Das Bett ist nur innerhalb geschlossener Räume zu verwenden und vor übermäßiger Feuchte zu schützen.

Die Anwendung der verschiedenen Verstellfunktionen kann vom Anwender mittels eines

IPX4-Handsalters mit Schließung

- Liegehöhen- und Liegeflächenverstellung

durchgeführt werden.

Es ist darauf zu achten, dass der Patient immer mit seinem Kopf an der „Kopfseite“ des Bettes liegt.

Alle Komponenten des Bettes dürfen nur nach dem jeweiligen bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet werden.

Überlastungen führen zu Beschädigungen und sind nicht zulässig.

2.1.1 Indikationen

bei nicht mehr spontan mobilen, bewegungseingeschränkten Kindern oder Jugendlichen oder Erwachsenen mit kognitiven Entwicklungsstörungen, wenn z.B.

- Bei Rumpfinstabilität die Einnahme einer ergonomischen Sitzposition im Bett erforderlich ist
- Zum Ein- und Aussteigen in bzw. aus dem Bett ein gesicherter Kontakt der Füße zum Boden erforderlich ist
- Zum Transfer z.B. in den Rollstuhl eine Höhenverstellbarkeit des Bettes gegeben sein muss.
- Für die Pflege eine Höhenverstellbarkeit der Liegefläche erforderlich ist.

2.1.2 Kontraindikationen


- keine bekannt

Die Verwendung des Bettes sollte erst nach Konsultation eines Arztes oder Therapeuten erfolgen.

2.2 Wichtige Hinweise zur Betriebssicherheit

- I. Der Aufbau und die Erstinbetriebnahme erfolgt durch den Fachhandel. Vor der Übergabe und bei jedem Wiedereinsatz muss eine Funktionsprüfung und sicherheitstechnische Kontrolle durchgeführt werden. Die Leichtgängigkeit aller Funktionen, die ordnungsgemäße Verlegung der Netzanschlussleitung, wie auch die feste Montage der Liegefläche im Bettkasten ist zu beachten. Dies gilt auch für den weiteren Betrieb des Therapie-Kinderbettes. Unsachgemäße Verlegung der Netzanschlussleitung (z.B. Knicken, Abscheren) kann zu schwerwiegenden Gefährdungen (Stromschlag) von Personen führen.
- II. Der Patient darf max. 135kg wiegen. Personenkreise jeglichen Alters mit vermindertem Wahrnehmungsvermögen dürfen das System nur unter Aufsicht bedienen.
- III. Die niedrigste Stellung des Bettbodens ist die sicherste und nur diese sollte verwendet werden, wenn nicht für Therapie + Pflege eine andere notwendig wird. Die Hubeinheit immer anschließend in die niedrigste Position herunterfahren.



- IV. Während der Verstellung der Hubeinheit keine Körperteile in oder unter sich bewegende Teile bringen. Es besteht **QUETSCHGEFAHR**.
- V. Das Therapie-Kinderbett „LEA“ ist nur für trockene Räume vorgesehen und darf auch nur in solchen betrieben und gelagert werden. Das System darf nur an übliche 230 Volt Steckdosen angeschlossen werden, Leitung + Stecker müssen trocken sein und dürfen an keiner Stelle reiben oder gequetscht werden. Achten Sie auf ordnungsgemäße Verlegung + Befestigung aller Kabel an den dafür vorgesehenen Punkten.
- VI. Um Überlastungen und Defekte der elektrischen Motoren zu vermeiden darf eine maximale Einschaltdauer von 2 Minuten nicht überschritten werden.
-  **Elektromotorische Kopf- und Fußteilverstellung nur zum Heben + Senken des Oberkörpers bzw. der Beine verwenden (Lage des Patienten im Bett beachten). Überlastung führt zu Beschädigungen und ist nicht zulässig!!!**
- Eine Überlastung der mechanischen Komponenten führt zu Beschädigungen und ist deshalb nicht zulässig. (siehe Bedienungsanleitung Pkt. 2.3 + 2.4 und Typenschild)
- VII. Bei Zweckentfremdung, unsachgemäßem Gebrauch, falscher Bedienung oder nicht fachgerechter Montage/Reparatur wird keine Haftung für event. Schäden übernommen. Alle Garantieleistungen sind in diesen Fällen ebenfalls ausgeschlossen.
- VIII. Die Antriebe dürfen nicht bei Vorhandensein von entzündlichen Gasen oder Dämpfen benutzt werden.
- IX. Das Therapie-Kinderbett „LEA“ darf ausschließlich mit Originalzubehör betrieben und mit Originalersatzteilen gewartet werden. Bei der Benutzung von Matratzen, die nicht mit diesem Bett kompatibel sind, können **Gefährdungen** entstehen. Bitte beachten Sie die Technischen Daten (Pkt. 3 / Seite 13.0 ff. dieser Betriebsanleitung).
- X. Sollten Betriebsstörungen auftreten, informieren Sie umgehend ihren Fachhändler. Insbesondere bei Beschädigungen elektrischer aber auch mechanischer Bauteile das Gerät nicht betreiben und Netzstecker ziehen.
- XI. Unsachgemäße Verlegung von elektrischen Leitungen anderer Geräte, im medizinisch genutztem Bett, verhindern. **Quetschgefahr** zwischen beweglichen Teilen des Bettes.



2.3 Warnhinweise

- I. Bei unbeaufsichtigten Patienten muss die Hubeinheit in ihre unterste, waagerechte Position gefahren werden. Die Drehtüren/ Seitengitter müssen verriegelt sein.
- II. Nichts im Bett liegen lassen, dass zum Hochsteigen benutzt oder was eine Gefahr des Erstickens oder Strangulierens mit sich bringen kann.
- III. Verstellen der Hubeinheit darf nur von einer eingewiesenen Person bzw. dem Pflegepersonal ausgeführt werden. Der Patient selbst darf das Bett nicht verstellen. Ist der Patient allein, sind alle Funktionen zu sperren (siehe Pkt. 2.6 Handschalter).
- IV. Der klinische Zustand des Patienten kann zum Einklemmen führen.
- V. Vorsicht beim Öffnen und Schließen der Drehtüren. **QUETSCHGEFAHR**. Die geöffneten, mittleren Drehtüren sind durch die, am oberen Ende befindlichen Magneten gesichert. Öffnen + Schließen der kompletten Türpakete nur in beaufsichtigter Situation.



- VI. Das Therapie-Kinderbett „LEA“ darf nur auf ebenem, horizontalem und festem Untergrund verwendet werden.
- VII. Nur in trockenen Räumen verwenden.
- VIII. Nicht in der Nähe von offenem Feuer oder anderen starken Hitzequellen (z. B. elektrischen Heizstrahlern, Gasöfen, etc.) aufstellen.
- IX. Die Benutzerlast beträgt max. 135 kg.
Die sichere Arbeitslast beträgt 170kg, einschl. Zubehör.
Elektromotorische Kopfteilverstellung bzw. Kopf- u. Fußteilverstellung (Zubehör) nur zum Heben bzw. Senken des Oberkörpers + der Beine verwenden (Lage des Patienten im Bett beachten).

2.4 Hubeinheit

Die Hubeinheit dient dem elektrischen Heben und Senken der Liegefläche.

**Die Benutzerlast beträgt max. 135 kg.
Die sichere Arbeitslast beträgt 170 kg, einschl. Zubehör.
Überlastung führt zu Beschädigungen und ist nicht zulässig.**

2.5 Liegefläche

Die vierteilige Holzliegefläche ermöglicht eine stufenlose Verstellung des Kopf- bzw. Fußteiles.



Es empfiehlt sich nicht, die Rücken- und Fußteilverstellung gleichzeitig in die oberste Position zu fahren, da es sonst für den Patienten zu eng und somit unangenehm werden kann.

Wenn bei Stromausfall oder Defekt des Liegeflächenmotors die Rückenlehne in einer angestellten Position stehen bleibt, haben sie die Möglichkeit das Rückenteil mittels Batterien (Bild 19) in die unterste Position zu verfahren.



Bild 19

Die Batterien sind nach einmaligem Gebrauch zu tauschen.

2.6 Handschalter

Mit dem Handschalter lassen sich alle elektrischen Funktionen steuern. Höhen- und Liegeflächenverstellung sind durch entsprechende Symbole gekennzeichnet. Durch leichtes Drücken auf die entsprechende Taste fährt das System in die gewünschte Position.



Beachten Sie, dass das Kabel des Handschalters beim Verstellen nicht gequetscht wird. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, hängen Sie bei Nichtgebrauch den Handschalter mit dem Bedienfeld nach außen an die dafür vorgesehene und durch einen Aufkleber markierte Stelle an die Bettumrandung (Bild 20).

Auf der Rückseite (Bild 21) des Handschalters befindet sich das Schloss zum Sperren bzw. zur Freigabe der Funktionstasten. Durch Drehen des Schlüssels wird der Handschalter „gesperrt“ bzw. „geöffnet“, die jeweilige Position zeigt der Pfeil an.



Der Schlüssel ist ein Sicherheitselement gegen unbefugten Gebrauch des Handschalters und deshalb immer räumlich getrennt aufzubewahren.

Tastenbelegung des Handschalters (Bild 21):

1. Bedienfeld (von oben).
Kopfteil hoch / runter (links bzw. rechts) bei elektromotorischer Liegefläche
2. Bedienfeld (von oben)
Fußteil hoch / runter (links bzw. rechts) bei elektromotorischer Liegefläche
3. Bedienfeld (von oben)
Kopf- + Fußteil gleichzeitig hoch / runter (links bzw. rechts) bei elektromotorischer Liegefläche
4. Bedienfeld (unten)
Hubmotor (Liegefläche) hoch / runter (links bzw. rechts)



Bild 20



Bild 21

2.7 Seitengitter

Zum Verstellen der Seitengitter betätigen Sie beide Verriegelungsmechanismen gleichzeitig. Jeweils den Zeigefinger in je eine runde Öffnung, Mittel- und Ringfinger in die entsprechende Griffschale unterhalb der runden Öffnung (Bild 22).



Mit dem Zeigefinger jeweils in Richtung Bettmitte drücken und damit die Verriegelung lösen. Danach ist kein weiterer Druck des Zeigefingers auf den Mechanismus nötig, Seitengitter läuft „frei“ bis zur nächsten Verriegelungsbuchse.



Bild 22

2.8 Transportrollen

App.-Lenkrolle, 75 x 30mm, Doppelstopp im Nachlauf.
Zur Verriegelung den Fußhebel nach unten drücken, lösen durch hochziehen des Fußhebels (Bild 23).

Nach jedem Verschieben des Bettes müssen alle Räder ordnungsgemäß verriegelt werden!

OPTIONAL: Zubehör
App.-Lenkrolle, 100 x 30mm.



Bild 23

2.9 Patientenlifter

Bei der Verwendung des Therapie-Kinderbettes „LEA“ sind ausschließlich die Patientenlifter „ARNOLD“ + „JAMES“ der Firma REBOTEC, D-49610 Quakenbrück, zu verwenden. Notwendiger freier Raum unter dem Bett maximal 110mm bzw. 90mm

2.10 Reinigung, Desinfektion und Wartung

Die glatt gehaltenen Oberflächen erleichtern Reinigen oder Desinfizieren. Weder die elektrische Anlage noch der Bettkasten sind für Hochdruckstrahler ausgelegt. Zur Reinigung sollte ein handfeuchtes Tuch mit einer geringen Menge Neutralseife verwendet werden, anschließend trocken nachwischen.

Eine Desinfektion des Bettes, mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln, ist möglich.



Die Wartung erfolgt nur durch autorisierte Personen. Wartung / Sicherheitstechnische Kontrolle und Prüfintervalle siehe Pkt. 5 „ANHANG“ der Betriebsanleitung.

2.11 Nutzungsdauer

Unsere Therapiebetten haben unter Berücksichtigung aller Nutzungs-, Wartungs- und Instandhaltungsvorgaben in dieser Gebrauchsanleitung eine zu erwartende Nutzungsdauer von bis zu 7 Jahre nach Inbetriebnahme. Eine Nutzung über diesen Zeitraum hinaus ist möglich, sofern das Therapiebett durch den Fachhandel, nach durchgeführter Wartung (siehe Wartungshinweise unter Punkt 4.2), für sicher befunden wurde und weiterhin wirksam eingesetzt werden kann. Bitte beachten Sie, dass sich die zu erwartende Nutzungsdauer nicht auf Verschleißteile wie z.B. Bremsrollen, Matratzen, Inkontinenzbezüge und Motoren für die elektrische Höhenverstellung bezieht.



Sollte es während der Nutzungsdauer des Therapiebetts zu einem schwerwiegenden Vorkommnis kommen, ist dies unverzüglich uns als Hersteller und der zuständigen Behörde (BfArM) zu melden.

2.12 Wiedereinsatz

Unsere Therapiebetten sind für den Wiedereinsatz geeignet. Führen Sie vor einem Wiedereinsatz die unter **Punkt 2.10** genannten Reinigungs- und Desinfektionshinweise aus. Führen Sie zudem, unabhängig zum normalen Wartungsintervall, eine Wartung nach den Vorgaben unter **Punkt 4.2** durch. Beachten Sie zudem, dass alle Dokumente wie z.B. diese Gebrauchsanleitung zum Therapiebett gehören und an den neuen Nutzer übergeben werden müssen.

Ersatzteillisten erhalten Sie beim Hersteller!

2.13 Zubehör

Matratze, schwerentzündbar nach DIN 597-1/2

- Länge x Breite siehe Technische Daten
- max. Dicke der Matratze
(darf nicht über das untere Querstück der Rückwand hinausragen).

Retuschierstift für Metallhubsystem

Oberflächenset für Holzteile

2.14 Symbolerklärung



Schutzklasse II



Verwendung nur in trockenen Räumen



Quetschgefahr



Wichtige Hinweise in der Bedienungsanleitung



Anwendungsteil Typ B

3. TECHNISCHE DATEN

3.1 Bettkasten

Außenmaße:		1.180 x 2.180 mm 980 x 1.780 mm
Liegefläche:		1.000 x 2.000 mm 800 x 1.700 mm
Betthöhe:	Standard	1.450 mm
	Vario	1.250 mm
OK Matratze	Standard	750 – 1.010 mm
	Vario	570 – 1.000 mm
Seitengitter:	Standard	605 mm
	Vario	605 mm

Gewicht Bettkasten + Hubeinheit ca. 191 kg

Gewicht:		
Kopf- und Fußteil		44 kg
Bettseiten		32 kg
Eingreifschutz		8 kg
Seitengitter, lang		22 kg
Seitengitter, kurz		<u>12 kg</u>
Gesamtgewicht Bettkasten:		ca. 118 kg
Matratze	Standard:	RG40, 12 cm dick, ca. 7 kg

3.2 Hubeinheit: (H. Kirchner Handels GmbH)

Maße		105 x 54 x 16 cm (L x B x H)
Gewicht		ca. 43 kg
Hub	Standard	260 mm
	Vario	430 mm
Hubkraft		230 kg

3.3 Liegefläche: (Rinova- Flex)

Bettboden		95 x 196 cm
Einteilung		2-4 - teilig
Gewicht		ca. 23 kg
Benutzerlast		135 kg
Sichere Arbeitslast		170 kg

3.4 Motoren: Hubeinheit „Megamat“

Netzspannung / Frequenz		230 Volt / 50 HZ
Motorenspannung		24 Volt
Schutzklasse		II
Lärmemission		< 65 dB (A)
Nennbetrieb		max. 2 min / 18min. Pause

Technische Änderungen vorbehalten!!!



FreiStil Tischlerei, Ruppenkampstraße 16, D - 49084 Osnabrück
Fon 0541-800 3969 0, Fax 0541-800 3969 99, info@freistil.com

4. ANHANG

4.1 Allgemeine Hinweise

- Wartung / Sicherheitstechnische Kontrolle dürfen nur von Personen mit entsprechender Qualifikation durchgeführt werden.
- Weitergehende Vorschriften des Gesetzgebers und der DGUV Vorschrift 3 bleiben unberührt.
- Reparatur aller elektrischen Komponenten **ausschließlich** durch vom Motorenhersteller **autorisierten Personen**.
- **Prüffristen:**
Bei jeder Erstinbetriebnahme und bei jedem Wiedereinsatz.
Wartung / Sicherheitstechnische Kontrolle **einmal jährlich bzw. alle 12 Monate**.
Sicht- und Funktionskontrolle aller mechanischen + elektrischen Teile.
Elektrische Überprüfung nach DIN EN ISO 62353.
- Prüfungen zum Zeitpunkt der Wartungsintervalle können am montierten System (beim Patienten) durchgeführt werden. Darüberhinausgehende Reparaturen müssen an geeigneten Arbeitsplätzen erfolgen.
- Es ist nur der Einbau von Originalteilen gestattet. Eigenanfertigungen führen zum Verlust aller Haftungs- und Gewährleistungsverpflichtungen des Herstellers. Ersatzteillisten erhalten Sie beim Hersteller.
- Systemveränderungen, Anbauten bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herstellers.
- Nach jeder Wartung und / oder Reparatur sind vollständige Funktionsprüfungen durchzuführen. Achten Sie auf kollisionsfreien Lauf aller sich bewegenden Teile um Gefahren für Patienten und dritte Personen sowie Beschädigungen am Material auszuschließen.
- Damit Sie Ihre Arbeit dokumentieren können, stehen Ihnen nachfolgend Anleitung + Protokollformular zur Verfügung.

4.2 Anleitung Wartung

Mindestens einmal im Jahr bzw. alle 12 Monate muss das Pflegebett einer Wartung unterzogen werden. Hierzu ist ausschließlich das geschulte Fachpersonal des Betreibers oder des Herstellers autorisiert. Sollten Abweichungen von den nachfolgend genannten Anforderungen auftreten, ist das Pflegebett bei sicherheitsrelevanten Einschränkungen aus dem Verkehr zu ziehen und instand zu setzen. Füllen Sie bitte nach jeder Wartung das Protokoll (Anlage) aus.

Führen Sie eine Sichtprüfung aller vorhandenen Teile am Bettboden (Lattenrost) durch. Entdecken Sie hierbei Beschädigungen sind diese Teile sofort instand zu setzen oder zu ersetzen.
Prüfen Sie die Leichtgängigkeit der beweglichen Teile, ggf. sind diese leicht einzufetten.

- Überprüfen Sie sämtliche Verstiftungen, Verschraubungen, Nietverbindungen und Schweißnähte. Es dürfen keine Risse oder Verformungen vorhanden sein oder Einzelteile der Verbindung fehlen (z.B. Sicherungsring, Schraubenmutter, etc.).
- Führen Sie eine Sichtprüfung aller Teile des Pflegebettes durch. Kopf + Fußteile / Bettseiten / Rückwand / Türen bzw. absenkbar Seitengitter.
- Prüfen Sie die Funktion + Leichtgängigkeit der Verriegelungen der Türen bzw. der absenkbar Seitengitter.
- Prüfen Sie die Bremsrollen des Pflegebettes auf ihre Funktionsfähigkeit. Fahr- und Bremsfunktion müssen einwandfrei funktionieren.
- Bei elektrisch verstellbaren Pflegebetten führen Sie eine Sicht- und Funktionsprüfung der Antriebe durch. Diese sind dem Verschleiß unterworfen. Sollte eine starke Erwärmung beobachtet werden, hohe Geräuschentwicklung, mahlende oder quietschende Geräusche entstehen, Metall- oder Kunststoffspäne am oder unter dem Motor vorhanden sein, der volle Verstellbereich nicht mehr zur Verfügung stehen, die Endabschalter nicht mehr reagieren oder die Antriebe langsamer als gewöhnlich sein, ist der betreffende Antrieb beschädigt und sofort auszutauschen.
- Bei elektrisch verstellbaren Pflegebetten überprüfen sie die Netzanschlußleitung und die gesamte Kabelführung auf Beschädigungen, Knick- und Scheuerstellen und festen, definierten Verlauf.
Achtung: Wenn die Netzanschlußleitung oder der Netzstecker beschädigt sind, müssen diese sofort ersetzt werden. Das Pflegebett ist nach dem Entdecken einer Beschädigung sofort der Verwendung zu entziehen.
- Bei elektrisch verstellbaren Pflegebetten überprüfen Sie den Handschalter auf einwandfreie Funktion und äußere Beschädigungen.

Überprüfen Sie das Pflegebett regelmäßig bei jeder Verwendung auf ordnungsgemäße Funktion. Gelockerte Verbindungen bitte sofort mit entsprechendem Werkzeug instandsetzen. Ein nicht einwandfreies Produkt ist sofort der Anwendung zu entziehen.



FreiStil Tischlerei, Ruppenkampstraße 16, D - 49084 Osnabrück
Fon 0541-800 3969 0, Fax 0541-800 3969 99, info@freistil.com

4.3 Vordruck für Protokoll

Wartung / Sicherheitstechnische Kontrolle nach § 6 MPBetreibV

Dieses Formular steht Ihnen auf unserer Internetseite zum Download zur Verfügung.
www.freistil.com/service

Protokoll Wartung / Sicherheitstechnische Kontrolle nach § 6 Medizinprodukte-Betreiberverordnung

<u>Sanitätshaus</u> Name	<u>Prüfer</u> Name	<u>Standort Bett</u> Name
Straße	Straße	Straße
PLZ / Ort	PLZ / Ort	PLZ / Ort

<u>Bett</u> Typ	<u>Prüfanlaß</u> Vor Inbetriebnahme <input type="checkbox"/>	<u>Bestätigung der Wartung</u>
lfd. Nr.	Intervallmäßige Wartung <input type="checkbox"/>	Datum / Unterschrift (Kunde)
.....	Nach Reparatur <input type="checkbox"/>

<u>Prüfung</u>	<u>Bauteil</u>	<u>i.O. / n.i.O</u>	<u>Bemerkungen</u>	<u>Elek. Prüfung Bauteil</u>	<u>i.O. / n.i.O</u>	<u>Bemerkungen</u>	
Sicht	Typenschilder	<input type="checkbox"/>	Sicht	Netzanschluß	<input type="checkbox"/>
Sicht	Betriebsanleitung	<input type="checkbox"/>	Sicht	Netzstecker	<input type="checkbox"/>
Sicht	Kopf + Fußteile	<input type="checkbox"/>	Sicht	Netzleitung	<input type="checkbox"/>
Sicht	Seitenteile	<input type="checkbox"/>	Sicht	Zugentlastung	<input type="checkbox"/>
Sicht	Hubsystem	<input type="checkbox"/>	Sicht	Antriebe	<input type="checkbox"/>
Sicht	Liegefläche	<input type="checkbox"/>	Sicht	Schutz / IPX 4	<input type="checkbox"/>
Sicht	Rollen	<input type="checkbox"/>	Funktion	Handschalter	<input type="checkbox"/>
Sicht	Verschraubungen	<input type="checkbox"/>	Endabschaltung	Endabschaltung	<input type="checkbox"/>
Funktion	Freilauf	<input type="checkbox"/>	Akku / Batterie	Akku / Batterie	<input type="checkbox"/>
Rollen	Feststellen	<input type="checkbox"/>	Messung	Widerstand	<input type="checkbox"/>	<u>Ist</u>
Funktion	Bremswirkung	<input type="checkbox"/>	Elektrische Prüfung Gesamt	Ableitstrom	<input type="checkbox"/> > 2 M Ohm
Seitenteile	Leichtgängigkeit	<input type="checkbox"/>	Verwendetes Messgerät: < 0,1 mA
	Verriegelung	<input type="checkbox"/>	<u>Bemerkung</u>
	Scharniere	<input type="checkbox"/>
Funktion	Hubmotoren	<input type="checkbox"/>
Motoren	Kopfmotor	<input type="checkbox"/>
	Fußteilmotor	<input type="checkbox"/>
	Trendelenburg	<input type="checkbox"/>
Funktion	<input type="checkbox"/>
Zubehör	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
Mechanische Prüfung Gesamt	<input type="checkbox"/>